

MANUAL TÉCNICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN



REV: 00

HOJA: 1

DE: 8

MANUAL TÉCNICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN

	CONTROL DE EMISIÓN										
_	Elabo	ró:		Revis	só:	Autorizó:					
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel A	[]	Dr. Ángel Herrefa Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García					
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de ₁Enfermería़	Sub direc Atención Ho y Consulta	pitalana	Director General Adjunto Médico	Director General					
Firma:	Mantinesthal	AHLLIUK-		1	\mathcal{M}						
Fecha:		Agosto	2018	•							



MANUAL TÉCNICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN



REV: 00

HOJA: 2

DE: 8

ÍNDICE

	HOJA
INTRODUCCIÓN	3
I OBJETIVOS DEL MANUAL	4
II ÁMBITO DE APLICACIÓN	4
III MARCO JURÍDICO	4
IV PROCEDIMIENTOS:	8
1 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y RESGUARDO DE BOMBAS DE INFUSIÓN	
2 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN	
3 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CUIDADO DE BOMBAS DE INFUSIÓN	
4 PROCEDIMIENTO PARA PRÉSTAMO DE BOMBAS DE INFUSIÓN	
5 PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES CON BOMBA DE INFUSIÓN	

		CONTROL	DE EMISIÓN		
Albert Lewis	Elabo	ró:	Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirees de Atención Hospitalajia y Consulta Ekterna	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Thurselle Leile	WALLANDE,		da	
Fecha:	7.01	Agosto	2018		



MANUAL TÉCNICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN



REV: 00

HOJA: 3

DE: 8

INTRODUCCIÓN

Una bomba de infusión es un dispositivo electrónico computarizado capaz de suministrar, mediante su programación y de manera controlada, una determinada cantidad de soluciones endovenosas, con o sin fármacos agregados (infusiones parenterales) a pacientes que por su condición clínica así lo requieran.

Éstos dispositivos electrónicos permiten la administración segura y precisa de una amplia gama de fármacos de alto riesgo y de uso frecuente en los diversos tratamientos farmacológicos que requieren los pacientes.

El uso de estos dispositivos pareciera elevado; sin embargo, ante la correcta preparación del fármaco, además de una efectiva programación y un adecuado funcionamiento de la bomba, se reduce el porcentaje de errores en el suministro intravenoso de medicamentos y/o soluciones.

Por otro lado, el personal de salud que utiliza estos dispositivos electro médicos, son responsables de dar un buen uso, cuidado e informar de forma oportuna ante la presencia de fallos en el funcionamiento o accidentes que se presenten durante su uso, ya que de ello depende la optimización de recursos y la prevención de eventos adversos.

En el presente manual se estandariza el manejo, uso y control de las bombas de infusión dentro de nuestra institución, se estipulan las políticas, lineamientos y responsabilidades para el personal que utiliza este equipo, coadyuvando a mantener barreras de seguridad en la funcionalidad, optimización y abasto que permita brindar una atención oportuna y con los menores riesgos posibles al paciente oncológico que lo requiera.

		CONTROL	DE EMIS	IÓN	The state of the s	
	Elabo	oró:		Revis	só:	Autorizó/
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Ør. Ánge	Apodaca	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de \ Enfermería		ctor de Iospitalaria	Director General Adjunto Medico	Director General
Firma:	Smitheally	Aurunt:			30	
Fecha:	7	Agosto	2018			



MANUAL TÉCNICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN



REV: 00

HOJA: 4

DE: 8

I.- OBJETIVOS DEL MANUAL

OBJETIVO GENERAL

Contar con un documento técnico administrativo que reúna los aspectos indispensables para un desempeño en común y responsable por parte del personal de salud que utiliza de manera directa o indirecta las bombas de infusión en los diversos tratamientos de los pacientes oncológicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1. Establecer responsabilidades entre el personal de enfermería que tiene bajo su resguardo las bombas de infusión que están en comodato por la empresa.
- 2. Establecer las políticas, lineamientos y procedimientos con apego a la normativa vigente que permitan a los profesionales de la salud del INCan, actuar bajo un mismo concepto en la atención de pacientes que son portadores de un dispositivo médico como lo son las bombas de infusión.

II.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente manual debe ser conocido, aplicado y mejorado por el personal de enfermería, médico, técnicos y camilleros de todas las áreas del Instituto Nacional de Cancerología donde se atienden pacientes que utilizan bomba (s) de infusión.

III.- MARCO JURÍDICO

El Departamento de Enfermería, se encuentra sustentado en el siguiente marco jurídico-normativo:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LEYES

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Ley General de Salud.
- Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos			Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de ∖ Enfermer∫a	Subdirector de Aterición Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Struck le Car	William.		CH/	
Fecha:	2 17	Agosto	0 2018		/



MANUAL TÉCNICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN



REV: 00

HOJA: 5

DE: 8

- Ley de Planeación.
- · Ley General de Bienes Nacionales.
- Ley Federal del Trabajo.
- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGLAMENTOS

- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.
- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos.
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DECRETOS

- Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Cancerología.
- Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. Vigente.

		CONTROL	DE EMISIÓN	1			
	Elabo	ró:		Revis	ó:		Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apo C <u>ruz</u>	daca	Dr. A	-	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de ∧ Enfermería	Subdirector Atención Hospi y Consulta Ex	italaria	Director Adjunto	1 11	Director General
Firma:	mary well.	Muniter		1.34	1	VJ	
Fecha:	1, 1,00	Agosto	2018				



MANUAL TÉCNICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN



REV: 00

HOJA: 6

DE: 8

ACUERDOS

- Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. Vigente.
- Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. Vigente.

NORMAS OFICIALES

- Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. Vigente.
- Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas. Vigente.
- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del Expediente Clínico. Vigente.
- Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud. Vigente.
- Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013, Para la organización y funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos. Vigente.
- Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Vigente.
- Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, para la práctica de cirugía mayor ambulatoria.
 Vigente.
- Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-038-SSA3-2016, Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos en la prestación del servicio social de enfermería. Vigente.
- Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, para la práctica de la anestesiología. Vigente.
- Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección Ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos- Clasificación y especificaciones de manejo. Vigente.

		CONTROL	DE EMISIÓN	1		
Malian III	Elabo	ró:		Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apo Cruz	daca	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses Gargía
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Lenfermería	Śubd irector Atención Hosp y Consulta Ex	italaria	Director General Adjunto Médico	Director defieral
Firma:	Grantin Cercler	White the same of		X	2/0	
Fecha:		Agosto	2018			/



MANUAL TÉCNICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN



REV: 00

HOJA: 7

DE: 8

- Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos. Vigente.
- Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA3-2016, Para la organización y funcionamiento de los servicios de radioterapia. Vigente.

PLANES Y PROGRAMAS

- Plan Nacional de Desarrollo. Vigente.
- Programa Sectorial de Salud. Vigente.
- Programa Nacional de Protección Civil. Vigente.
- Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación. Vigente.
- Programa Nacional de Derechos Humanos. Vigente.

OTRAS DISPOCISIONES

- Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cancerología.
- Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología.
- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Código de Ética para las Enfermeras y Enfermeros de México.
- Decálogo del Código de Ética para las Enfermeras y Enfermeros en México.
- Código deontológico del Consejo Internacional de Enfermeras.
- Carta de los Derechos Generales de los Pacientes.

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elaboró: Revisó:				Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gomez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de \ Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Shurthold Lly	Juliul Hatter		1/2/	
Fecha:		Agosto	2018		,



MANUAL TÉCNICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN



REV: 00

HOJA: 8

DE: 8

IV.- PROCEDIMIENTOS

		CONTROL	. DE EMISIĆ	N		
	Elabo	ró:	^	Autorizó:		
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Al Cruz		Dr. Ángel Herre <u>r</u> a Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermerja	Subdirect Atención Hos Consulta	italaria	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Shubbles	William !			W	
Fecha:	111/100	Agosto	2018			/



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

1. Procedimiento para el control y resguardo de bombas de infusión



REV:

00

HOJA: 1

DE: 18

1. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y RESGUARDO DE BOMBAS DE INFUSIÓN

		CONTROL	DE EMISIÓN	\cap	
	Elabo	ró:	Rev	/isó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdisector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General	1
Firma:	Hut till!	dillitit		40/	
Fecha:	11.11	Agosto	2018		

SALUD SIGNETIAN DE SALIDO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:

00

HOJA: 2

DE: 18

1. Procedimiento para el control y resguardo de bombas de infusión

1. PROPÓSITO

Estandarizar y establecer las políticas necesarias que permitan asegurar el resguardo de las bombas de infusión por parte de jefes de servicio o encargados y supervisoras haciendo coparticipes al personal asistencial de enfermería, a fin de garantizar un abastecimiento completo y oportuno.

2. ALCANCE

- 2.1 A nivel interno este procedimiento es aplicable al Departamento de Enfermería, través de los jefes de servicio o encargados, supervisores y personal asistencial de enfermería del INCan en cada uno de los diferentes turnos y servicios.
- 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al personal de la empresa proveedora de bombas de infusión.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS

- 3.1 Es responsabilidad de los jefes de servicio o encargados y supervisoras, cumplir con éste procedimiento y mantenerlo actualizado.
- 3.2 Es responsabilidad de los jefes de servicio o encargados de los cuatro turnos, firmar el resguardo de las bombas de infusión.
- 3.3 Es deber de los jefes de servicio o encargados, informar al personal que lo suple durante su ausencia, la responsabilidad compartida en el resguardo de las bombas de infusión.
- 3.4 El personal que labora dentro del área y que utiliza de manera directa o indirecta las bombas de infusión, deberá mantener una conducta ética y responsable para fungir como resguardante, además de dar cumplimiento a cada una de las políticas establecidas en este procedimiento, así como en la legislación vigente.
- 3.5 Es deber de la Jefatura del Departamento de Enfermería solicitar al personal de la empresa proveedora, la autorización para rotular las bombas de infusión. En caso de que exista cambio de empresa, instar para que la misma rotule las bombas antes de hacer entrega en cada servicio.
- 3.6 Es responsabilidad de la Jefatura del Departamento de Enfermería asignar un código de color por cada servicio (Anexo 1), como identificador visual de las bombas de infusión, que permita la identificación de manera rápida.
- 3.7 El identificador visual del color asignado se debe colocar en la agarradera de la bomba de infusión para mayor visibilidad. (Anexo 2)
- 3.8 Todas las bombas de infusión deben tener un membrete adherible en los costados con los siguientes datos:
 - a) El servicio a donde pertenece la bomba.

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	só:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz,	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Strille VIIIVIV	Alluttitie.		dy	P
Fecha:	1 1 1 0	Agosto	2018		



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

Procedimiento para el control y resguardo de bombas de infusión



REV:

00

HOJA: 3

DE: 18

- b) El número de control interno con el cual se podrá identificar de manera rápida las bombas existentes en el servicio. (Anexo 3)
- 3.9 La empresa proveedora de bombas de infusión, colocara un marbete institucional (de la empresa) en cada bomba de infusión, haciendo referencia al número de control interno asignado, el servicio, el número de serie y los datos para el mantenimiento preventivo o correctivo. (Anexo 4)
- 3.10 Es deber de la empresa proveedora de bombas de infusión hacer entrega del listado (consolidado de entrega de bombas de infusión) o inventario de los productos entregados.
- 3.11 Es responsabilidad de la persona que recibe bombas de infusión de nueva adquisición solicitar al personal de la empresa el listado de equipo que recibe, así como la cantidad, características, aditamentos y número de serie de cada una.
- 3.12 Los jefes de servicio y/o encargados de los cuatro turnos, son los responsables de conocer, resguardar, actualizar y dar buen uso al listado (inventario) de las bombas de infusión que entrega la empresa y que deja bajo su control.
- 3.13 Es responsabilidad de los jefes de servicio agregar a su carpeta gerencial las herramientas de control de las bombas de infusión que tienen bajo su resguardo, considerando el listado (inventario) que entrega la empresa, además de agregar:
 - a) Número de control interno, representado por el número progresivo que se le ha dado a cada bomba.
 - b) Número de serie de la bomba de infusión, representado por el número de la placa en cada bomba de infusión y que la empresa utiliza para su control.
 - c) Observaciones
- 3.14 Los jefes de servicio o encargados de los diferentes turnos y servicios, serán los responsables de designar un área de resguardo único donde se concentren las bombas de infusión que no estén siendo ocupadas con los pacientes.
- 3.15 Los jefes de servicio o encargados de los diferentes turnos son los responsables de notificar al personal a su cargo, donde, como y cuando deben resguardar las bombas de infusión.
- 3.16 Cuando las bombas de infusión no se estén utilizando con pacientes, deberán colocarse en orden en el área asignada para su resguardo, previa limpieza y con su respectivo cable de alimentación eléctrica.
- 3.17 En caso de préstamos de bombas de infusión de un servicio a otro (Ver procedimiento de préstamo de bomba de infusión), se llenará el vale correspondiente del préstamo y se resguardará hasta la entrega de la misma, de ésta manera la responsabilidad del cuidado de la bomba pasa al servicio solicitante. (Anexo 5)
- 3.18 En caso de que alguna bomba de infusión requiera mantenimiento preventivo o correctivo, el proveedor y el jefe de servicio o encargado llenarán el "Formato de control de bombas de infusión para revisión externa por proveedores", de ésta manera se justificará el faltante de la bomba dentro del servicio. (Anexo 6)

		CONTROL	DE EMISIÓN	\cap	
	Elabo	ró:	Revis	só:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Árgel Adodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Sub director de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Medico	Director General
Firma:	Some Willey	Mullitte			
Fecha:	10.0	Agosto	2018		



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

1. Procedimiento para el control y resguardo de bombas de infusión



REV:

00

HOJA: 4

DE: 18

- 3.19 En caso de extravío de bombas de infusión se notificará al jefe de servicio y supervisora, y se procederá a la búsqueda exhaustiva; en caso de no aparecer se procederá conforme al "Procedimiento para presentar denuncia para la recuperación de bienes robados y/o extraviados propiedad del Instituto", anexando una copia al listado de resguardo para justificar la ausencia y notificar al proveedor.
- 3.20 Es responsabilidad de los jefes o encargados de servicio y supervisoras contar con la información correspondiente a la existencia y uso de las bombas de infusión y verificar que se realicen los procesos correctos para su manejo y control, así como dar seguimiento de aquellas bombas que se prestaron a otros servicios o que se llevaron para su reparación o mantenimiento.

		CONTROL	DE EMISIÓN	4	
	Elabo	ró:	Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Strate Call Vell	Juliume:		dy	7
Fecha:	217	Agosto	0 2018		



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

1. Procedimiento para el control y resguardo de bombas de infusión



REV:

HOJA: 5

00

DE: 18

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
Empresa proveedora de bombas de infusión	2	Coloca marbete institucional (de la empresa) en cada bomba de infusión. Entrega listado (consolidado de entrega de bombas de infusión) o inventario de los productos entregados a la Jefatura del Departamento de Enfermería.	- Consolidado de entrega de bombas de infusión
Jefatura del Departamento de Enfermería	3 4 5	Recibe consolidado de entrega de bombas de infusión o inventario de los productos que van a ser entregados a cada servicio. Solicita al personal de la empresa proveedora, la autorización para rotular las bombas de infusión, o en su caso instar para que la misma rotule las bombas antes de hacer entrega en cada servicio. Asigna un código de color por cada servicio como identificador visual de las bombas de infusión, que permita su identificación.	Consolidado de entrega de bombas de infusión
Empresa proveedora de bombas de infusión	6	Realiza entrega física de las bombas de infusión asignadas en cada servicio, mediante consolidado de entrega de bombas de infusión.	- Consolidado de entrega de bombas de infusión
Jefes de servicio o encargados de los diferentes turnos y servicios	7 8 9	Recibe bombas de infusión mediante Consolidado de entrega de bombas de infusión por parte de la empresa. Verifica las condiciones de entrega de las bombas de infusión asignadas al servicio y determina: ¿Las condiciones de entrega son adecuadas? No: Regresa el producto al proveedor e informa a la Subdirección de Recursos Materiales. Regresa a la Actividad No. 1.	- Consolidado de entrega de bombas de infusión

	CONTROL DE EMISIÓN						
-	Elabo	ró:	Revis	só:	Autorizó:		
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cru z	Dr. Ángel Herrera Gomez	Dr. A. Abelardø Meneses García		
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirec or de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General		
Firma:	Shortitul Cor.	Millium		100	1		
Fecha:	71111	Agosto	2018				

SALUD MORETURE SHOPE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:

DE:

00

18

HOJA: 6

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
	10	Si: Firma listado de resguardo.	el-unicopa estel
	11	Asigna número de control interno a cada bomba de infusión en el listado de resguardo, en cotejo con el número de serie de la bomba y lo registra.	
Jefes de servicio o encargados de los diferentes turnos y servicios	12	Coloca el membrete con el nombre del servicio y el número asignado en los costados de la bomba de infusión, coloca la cinta de color en la agarradera de acuerdo al código de colores.	Listado de resguardo Listado de código de colores o distintivo por
turnos y servicios	13	Designa el área de resguardo único, donde se concentren las bombas de infusión que no estén siendo ocupadas con los pacientes.	servicio
	14	Informa al personal del servicio sobre los sistemas de control de las bombas de infusión.	
Enfermería	15	Toma conocimiento y da cumplimiento a las políticas establecidas para el resguardo y control de bombas de infusión.	- Notas de registro
asistencial	16	Notifica al jefe inmediato, sobre los eventos presentados, mediante las notas de registro de eventos.	de eventos
	17	Toma conocimiento de los eventos presentados y les da seguimiento.	
Jefes de servicio o encargados de los diferentes turnos y servicios	18	Verifica el cumplimiento de las políticas para el control y resguardo de bombas de infusión.	Notas de registro de eventos
		TERMINA.	

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	só:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	/Subd <u>irector</u> de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	HISTORIAN SULL	Williatte.		CW	p
Fecha:	101	Agosto	2018	9	

SALUD MICRETAGIA DE SALUG

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:


00

HOJA: 7

DE: 18

1. Procedimiento para el control y resguardo de bombas de infusión

5. DIAGRAMA DE FLUJO:

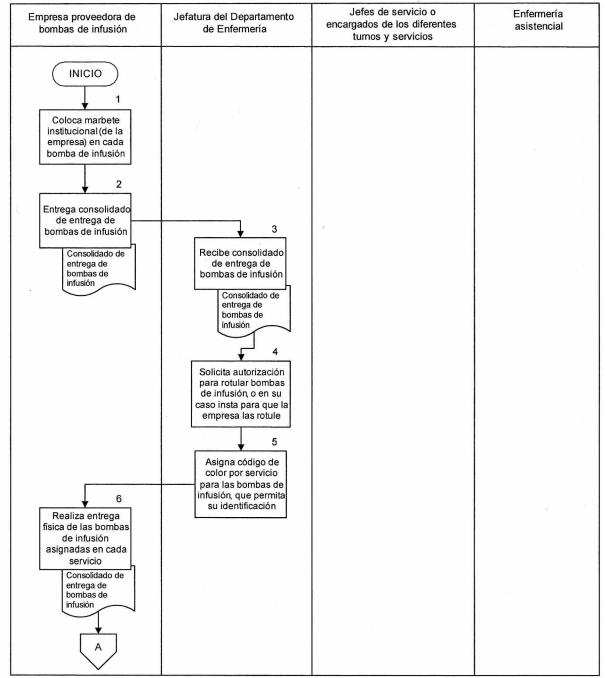

		CONTROL	DE EMISIÓ	N		
	Elabo	ró:		Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Ac Cruz		Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermer/a	Subdirect Atención Hos y Consulta	pitalaria	Director General Adjunto Medico	Directo General
Firma:	Struthtakley	Mullette:		430	W	
Fecha:	Agosto 2018					

SALUD SCRETARIA DI SMIPO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:

00

HOJA: 8

DE: 18

Empresa proveedora de bombas de infusión	Jefatura del Departamento de Enfermería	Jefes de servicio o encargados de los diferentes turnos y servicios	Enfermería asistencial
pompas de iniusion	de Ellielliella	Recibe bombas de infusión mediante Consolidado de entrega de bombas de infusión Consolidado de entrega de bombas de infusión Verifica las condiciones de entrega de las bombas de infusión y determina ¿Las condiciones SI de entrega son adecuadas? NO 9 Regresa el producto al proveedor e informa. Regresa a	
		In Actividad No. 1. 10 Firma listado de resguardo Listado de resguardo	

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revi	só:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y/Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Directo General
Firma:	Trustal VIVE	William The Control of the Control o		M	7
Fecha:	2. 10. 10. 10.	Agosto	2018		



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

PRO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY


REV:

DE:

00

18

HOJA: 9

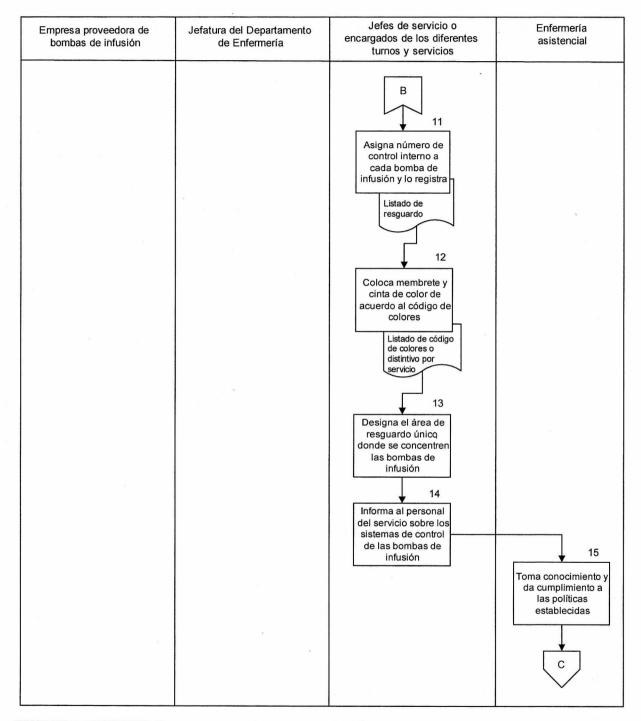

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses Garçía
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector/de Atención Hospitalaña ly Consulta Ekterna	Director General Adjunto Medico	Director General
Firma:	Strathelle	Allumit.		,) 0	
Fecha:	7 10 10	Agosto	2018		

SALUD MCBETAREA DE SALUD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)




REV:

00

HOJA: 10

DE: 18

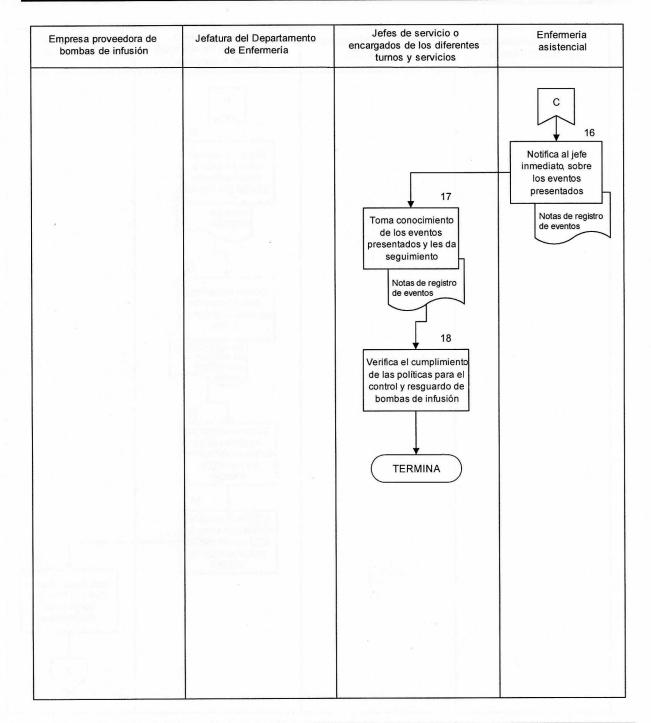

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	ó: ^	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Haspitalaria y/Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Shuretu Wall	Mullitute:		101	1.
Fecha:	1 1 1 8	Agosto	0 2018		



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

Procedimiento para el control y resguardo de bombas de infusión



REV:

HOJA: 11

00

DE: 18

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos	Código (cuando aplique)
6.1 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal	N/P
6.2 Ley de los Institutos Nacionales de Salud	N/P
6.3 Reglamento Interior de la Secretaria de Salud	N/P
6.4 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	N/P
6.5 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	N/P
6.6 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	N/P
6.7 Estatuto Orgánico y Decreto de creación del Instituto Nacional de Cancerología	N/P
6.8 Estructura Orgánica Autorizada, vigente (Estructura, dictamen y oficio de la SFP)	N/P
6.9 Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente	N/P
6.10 Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología vigente	N/P
6.11 Procedimiento para el préstamo de bombas de infusión dentro del INCan	N/P
6.12 Procedimiento para presentar denuncia para la recuperación de bienes robados y/o extraviados propiedad del Instituto	MPG-INCAN-2005
6.13 NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.	N/P

7. REGISTROS

Registros	Tiempo de Conservación	Responsable de Conservario	Código de Registro o Identificación Única
Listado de resguardo o Consolidado de entrega de bombas de infusión.	Por el tiempo que la empresa deje en comodato las bombas en el Instituto.	Jefes de servicio o encargados de los diferentes turnos y servicios	N/A
Bitácora de recepción de bombas	1 año	Jefes de servicio de los diferentes turnos y servicios	N/A

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	Autorizó:	
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses Gargía
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector te Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Medico	Director General
Firma:	Anst Velley	MHUULUU E		W	
Fecha:		Agosto	2018		



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

REV:

00

HOJA: 12

DE: 18

1. Procedimiento para el control y resguardo de bombas de infusión

8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO

8.1 Bomba de Infusión:

Dispositivo electrónico computarizado capaz de suministrar, mediante su programación y de manera controlada, una determinada cantidad de soluciones endovenosas con a sin fármacos agregados (infusiones parenterales) u oral (infusiones enterales) a pacientes que por su condición así lo requieran.

8.2 Consolidado de entrega:

Listado en el cual se agrupa la mercancía o producto para ser entregados bajo un mismo documento.

8.3 Distintivo:

Que distingue, diferencia o caracteriza a las bombas de infusión a través de la abreviatura del nombre del servicio.

8.4 Encargada (o) de servicio:

Persona a quien se le ha delegado la autoridad ante la ausencia programada o no programada de un jefe o personal de confianza, se encarga de gestionar, administrar y control al recurso humano, material y financiero del servicio, además de ejercer un liderazgo efectivo con el grupo de trabajo.

8.5 Identificador visual:

Cinta adhesiva de diversos colores que se coloca en la agarradera de cada una de las bombas de infusión; el color va de acuerdo al asignado al servicio.

8.6 Marbete:

Membrete o etiqueta adherible que se coloca sobre una superficie para indicar alguna información relacionada con ella.

8.7 Número de control interno: Número progresivo que se asigna a cada una de las bombas de infusión considerando iniciar desde el 1 hasta número total de bombas asignadas al servicio.

9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

Número de Revisión	Fecha de la Actualización	Descripción del Cambio	
No aplica	No aplica	No aplica	

10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO

- 10.1 Anexo 1 Código de colores para bombas de infusión por servicio.
- 10.2 Anexo 2 Identificador visual.
- 10.3 Anexo 3 Rótulos de identificación.
- 10.4 Marbetes que coloca la empresa.
- 10.5 Anexo 5 Vale "préstamo bombas de infusión".
- 10.6 Anexo 6 Formato de Control de Bombas de Infusión para Revisión Externa por Proveedores.

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	oró:	Revis	Autorizó:	
Nombre:	L.E.O Angélica González González			Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García Director Bederal
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras Jefa del Departamento de		Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	
Firma:	Thursday Cel .	Millimite.		l dVl	
Fecha:	1) 1 1	Agosto	2018	W	/



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

1. Procedimiento para el control y resguardo de bombas de infusión



REV:

00

HOJA: 13 DE: 18

ANEXO 1

CÓDIGO DE COLORES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN POR SERVICIO

SERVICIO	COLOR O DISTINTIVO
RECUPERACIÓN	ROTULADAS CON "RECUPERACIÓN"
QUIRÓFANO	ROTULADAS CON SALA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA	NEGRO
5º PISO DE HOSPITALIZACIÓN	VERDE
6º PISO DE HOSPITALIZACIÓN	ROJO
7º PISO DE HOSPITALIZACIÓN	AZUL CLARO
UNIDAD DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA	BLANCO
QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA	AZUL INTENSO
ATENCIÓN INMEDIATA	AMARILLO
ENDOSCOPIA	ROTULADAS CON "ENDOSCOPIA"
CUIDADOS PALIATVOS	ROTULADAS CON "PALIATIVOS"
BRAQUITERAPIA	ROTULADAS CON "BRAQUI"
IODO	ROTULADAS CON "IODO"
CLÍNICA DEL DOLOR	ROTULADAS CON "C. DOLOR"
TOMOGRAFÍA	ROTULADAS CON "TAC"
ANGIOTAC	ROTULADAS CON "ANGIO"
MEDICINA NUCLEAR	ROTULADAS CON "MED. NUC."

		CONTROL	DE EMISIC	ЙČ		
	Elabo		Revis	ó:	Autorizó:	
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel A	(.5)	Dr. Ángel Heriera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses Garçía
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdi rec Atención Ho y Consulta	pitalaria	Director General Adjunto Medico	Director Coneral
Firma:	Struptus Cold Kell	WHIHIH E				
Fecha:		Agosto	2018			



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

1. Procedimiento para el control y resguardo de bombas de infusión



REV:

00

HOJA: 14

DE: 18

ANEXO 2 IDENTIFICADOR VISUAL



		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	Autorizó:	
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García Director General
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdir ector de Atención Hospitalaña y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	
Firma:	Traballey	Millitte		NA	/
Fecha:	1000	Agosto	0 2018	4	

SALUD SIEREEMEIA DE SALVED

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)




REV: 00

HOJA: 15

DE: 18

Procedimiento para el control y resguardo de bombas de infusión

ANEXO 3 ROTULOS DE IDENTIFICACIÓN

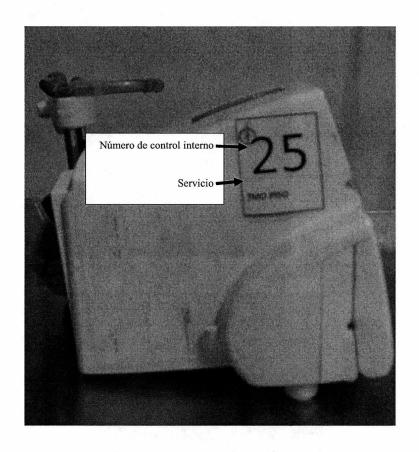

	CONTROL	DE EMISION		1 1
Elabo	ró:	Revis	só: N	Autorizó:
L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Apodaca	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de ∫ Enfermería	Su <u>bdirector</u> de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Shutti XILY (IV)	William E'		W	
1110	Agost	o 2018		
	L.E.O Angélica González González Jefe de enfermeras "B"	Elaboró: L.E.O Angélica González González Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos Jefa del Departamento de Enfermería	Elaboró: Revis L.E.O Angélica Lic. Enf. Inés I. González González Mendoza Santos Cruz Jefe de enfermeras "B" Jefe de "B" Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos Jefa del Departamento de Atención Huspitalaria y Consulta Externa	L.E.O Angélica González González Jefe de enfermeras "B" Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos Dr. Angel Appdaca Criz/ Subdirector de Atención Huspitalaria y Consulta Externa Director General Adjunto Médico

SALUD SCREDIGHES SUPP

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

1. Procedimiento para el control y resguardo de bombas de infusión




REV:


HOJA: 16

00

DE: 18

ANEXO 4 MARBETES QUE COLOCA LA EMPRESA

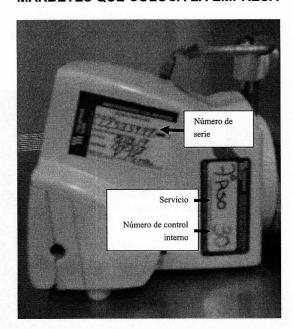

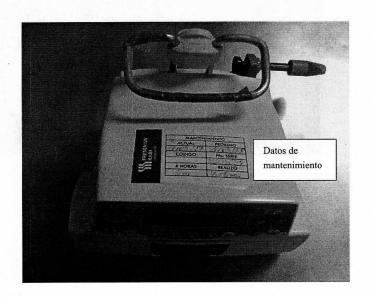

	A Company	CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	Autorizó: Dr. A. Abelardo Meneses García	
Nombre: L.E.O Angélica González González		Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Apodaca Cruz		Dr. Ángel Herrera Gómez
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Traductular	Allulutur.		(W)	
Fecha:		Agosto	o 2018	4.1	

SALUD SICREFANDE DE SALUE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:

00

HOJA: 17

DE: 18

1. Procedimiento para el control y resguardo de bombas de infusión

ANEXO 5

VALE "PRESTAMO BOMBAS DE INFUSIÓN"

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

Servicio prestador:		Servicio solicitante:
Fecha de préstamo:		Fecha de Entrega:
Turno:		Turno:
Nombre de enfermera (o) que r	ealiza préstamo:	Nombre de enfermera (o) que solicita préstamo:
Nombre y firma de jefe o encarg	gada de servicio:	Nombre y firma de jefe o encargada de servicio:
Nombre del Paciente:		
No. Expediente:	No. Cama	==
1-No. Folio:	Cable: Sí	No
2-No. Falio:		No
3-No. Falio:	Cable: Sí	No
4-No. Falio:		
Nombre y Firma de Enfermera q	jue recibe bomba de Infusi INSTITUTO NACIONAL	L DE CANCEROLOGÍA
Nombre y Firma de Enfermera q	jue recibe bomba de Infusi INSTITUTO NACIONAL	ión:
Nombre y Firma de Enfermera q	INSTITUTO NACIONAL CCIÓN DE ATENCIÓN HOSI DEPARTAMENTO: VALE "PRESTAMO BO	ión:
Nombre y Firma de Enfermera q	INSTITUTO NACIONAL CCIÓN DE ATENCIÓN HOSE DEPARTAMENTO: VALE "PRESTAMO BO	L DE CANCEROLOGÍA PITALARIA Y CONSULTA EXTERNA DE ENFERMERÍA DMBA S DE INFUSIÓN"
Nombre y Firma de Enfermera q SUBDIRE Servicio prestador:	INSTITUTO NACIONAL CCIÓN DE ATENCIÓN HOSE DEPARTAMENTO: VALE "PRESTAMO BO	L DE CANCEROLOGÍA PITALARIA Y CONSULTA EXTERNA DE ENFERMERÍA DIMBA S DE INFUSIÓN" Servicio solicitante:
SUBDIRE SUBDIRE Servicio prestador: Fecha de préstamo:	INSTITUTO NACIONAL CCIÓN DE ATENCIÓN HOSI DEPARTAMENTO VALE "PRESTAMO BO	ión:
subdire y Firma de Enfermera q subdire	INSTITUTO NACIONAL CCIÓN DE ATENCIÓN HOSI DEPARTAMENTO VALE "PRESTAMO BO	L DE CANCEROLOGÍA PITALARIA Y CONSULTA EXTERNA DE ENFERMERÍA DMBAS DE INFUSIÓN" Servicio solicitante: Fecha de Entrega: Turno:
Nombre y Firma de Enfermera q SUBDIRE Servicio prestador: Fecha de préstamo:	INSTITUTO NACIONAL CCIÓN DE ATENCIÓN HOSE DEPARTAMENTO: VALE "PRESTAMO BO ealiza préstamo:	ión:
SUBDIRE SUBDIRE Servicio prestador: Fecha de préstamo: Furno: Nombre de enfermera (o) que re	INSTITUTO NACIONAL CCIÓN DE ATENCIÓN HOSE DEPARTAMENTO: VALE "PRESTAMO BO ealiza préstamo:	ión:
SUBDIRE SUBDIRE Servicio prestador: Fecha de préstamo: Furno: Nombre de enfermera (o) que re Nombre y firma de jefe o encarg	INSTITUTO NACIONAL CCIÓN DE ATENCIÓN HOSE DEPARTAMENTO: VALE "PRESTAMO BO ealiza préstamo: gada de servicio:	L DE CANCEROLOGÍA PITALARIA Y CONSULTA EXTERNA DE ENFERMERÍA DMBAS DE INFUSIÓN" Servicio solicitante: Fecha de Entrega: Turno: Nombre de enfermera (o) que solicita préstamo: Nombre y firma de jefe o encargada de servicio:
SUBDIRE SUBDIRE SUBDIRE Servicio prestador: Fecha de préstamo: Furno: Nombre de enfermera (o) que re Nombre y firma de jefe o encarg	INSTITUTO NACIONAL CCIÓN DE ATENCIÓN HOSE DEPARTAMENTO: VALE "PRESTAMO BO ealiza préstamo: gada de servicio: No. Cama Cable: Sí	L DE CANCEROLOGÍA PITALARIA Y CONSULTA EXTERNA DE ENFERMERÍA DMBAS DE INFUSIÓN" Servicio solicitante: Fecha de Entrega: Turno: Nombre de enfermera (o) que solicita préstamo: Nombre y firma de jefe o encargada de servicio:
SUBDIRE SUBDIRE SUBDIRE Servicio prestador: Fecha de préstamo: Furno: Nombre de enfermera (o) que re Nombre y firma de jefe o encarg	INSTITUTO NACIONAL CCIÓN DE ATENCIÓN HOSE DEPARTAMENTO: VALE "PRESTAMO BO ealiza préstamo: gada de servicio: No. Cama Cable: Sí	L DE CANCEROLOGÍA PITALARIA Y CONSULTA EXTERNA DE ENFERMERÍA DMBAS DE INFUSIÓN" Servicio solicitante: Fecha de Entrega: Turno: Nombre de enfermera (o) que solicita préstamo: Nombre y firma de jefe o encargada de servicio: B: No No No

		CONTROL	DE EMISIÓN	1 14	
	Elabo	ró:	Revis	Autorizó:	
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Apodaca Cruz	Dr Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Medico	Director/General
Firma:	Startinkllockell	Mulling		W	
Fecha:		Agosto	2018		

SALUD MCRETARIA DE MATED



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

1. Procedimiento para el control y resguardo de bombas de infusión



REV:

00

HOJA: 18

DE: 18

ANEXO 6 FORMATO DE CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN PARA REVISIÓN EXTERNA POR PROVEEDORES.



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA Y CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

FORMATO DE CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN PARA REVISIÓN EXTERNA POR PROVEEDORES Motivo de salida Fecha de Nombre de Nombre de Salida quién recoge quién da entrega de quién recibe quien

No. Control interno	No. Serie	Motivo de salida	salida	Nombre de quién recoge la bomba (empresa)	quién da salida a la bomba (INCan)	entrega de bomba reparada	Quién recibe (INCAD)	quien entrega (empresa)	V038173 102183

		CONTROL	DE EMISIÓ	N		
	Elabo		Revis	ó:	Autorizó:	
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel A Cruz		Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo- puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermenta	Subdirect Atención Ho y Consulta	pitala ia	Director General Adjunto Medico	Director/General
Firma:	Stretty (Jelly)	HAMMANTE.			(M)	
Fecha:	1111	Agosto	2018			



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión



REV:

00

HOJA: 1

DE: 21

2. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN

		CONTROL	. DE EMISIÓN		-
	Elabo	ró:	Revis	ó: /	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica	Lic. Enf. Inés I.	Dr. Ángel Apedaca	Dr. Ángel	Dr. A. Abelardo
TTOTTIBLE.	González González	Mendoza Santos	Gruz /	Herrera Gómez	Meneses Garçía
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento ∫ de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Medico	Director Opneral
Firma:	Anattritally.	WHILLIAM CO		The /	1
Fecha:	7,1	Agos	to 2018		/.



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión



REV:

HOJA: 2

00

DE: 21

1. PROPÓSITO

Recibir de manera efectiva y eficaz las bombas de infusión y torres para bombas de infusión asignadas al servicio, con el fin de garantizar el control de las mismas durante los enlaces de turno, así como conocer su ubicación dentro del servicio o de la Institución.

2. ALCANCE

- 2.1 A Nivel Interno este procedimiento es aplicable al Departamento de Enfermería, a través del personal de enfermería de cada uno de los servicios donde se cuente con bombas de infusión y torres para bombas de infusión, supervisores, jefes y encargados de servicio.
- 2.2 A nivel externo el procedimiento no es aplicable.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS

- 3.1 El personal implicado en el manejo y uso de bombas de infusión es el responsable de cumplir con este procedimiento y de mantenerlo actualizado.
- 3.2 Es responsabilidad de la Jefatura del Departamento de Enfermería, elaborar, evaluar y actualizar el formato de recepción de bombas de infusión de acuerdo a necesidades detectadas.
- 3.3 Es responsabilidad del jefe de servicio o encargado, establecer un rol de recepción de bombas de infusión y torres para bombas de infusión con el personal a su cargo e informar de la actividad delegada, además de integrar a su carpeta administrativa y verificar su cumplimiento.
- 3.4 Ante la ausencia del personal de enfermería asignado para la recepción de bombas de infusión y torres para bombas de infusión, el jefe de servicio y/o supervisora de enfermería asignarán a una persona de la plantilla del personal de enfermería para cubrir la ausencia y realizar la recepción.
- 3.5 Es responsabilidad del personal asignado para la recepción de bombas de infusión presentarse puntalmente al servicio para realizar un enlace efectivo.
- 3.6 La recepción de bombas de infusión se realiza con el formato institucional haciendo las anotaciones correspondientes de acuerdo a normativa establecida. (Anexo 1)
- 3.7 Los "Formatos de Recepción de Bombas de Infusión" se encuentran rotulados con el nombre de cada servicio, además contiene: el número de control interno, el número de serie de cada bomba y los espacios correspondientes para registrar su ubicación por turno.
- 3.8 Las siglas utilizadas para el llenado de los formatos de recepción de bomba de infusión son:
 - A = Almacén del servicio
 - F = Faltante
 - M = Mantenimiento por la empresa
 - VP = Vale de Préstamo

		CONTROL	DE EMISIÓ	N		
Table Bab.	Elabo	ró:		Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Ap Cruz	1 4 1	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses Gárcía
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirecto Atención Hos y Consulta E	talaria	Director General Adjunto Medico	Directo General
Firma:	Thursday Lev.	Alluntte:		TV	9	
Fecha:	1. 1.	Agos	to 2018			



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión



00

REV:

HOJA: 3

DE: 21

- 3.9 El personal asignado a cada turno, es responsable de registrar la información obtenida durante la recepción en los espacios correspondientes, evitando omitir información que conflictué la comunicación.
- 3.10 Es responsabilidad del jefe de servicio o encargado, así como del personal asignado para la recepción de bombas y torres para bombas de infusión, recibir y entregar la bitácora de recepción al siguiente turno.
- 3.11 El personal responsable de la recepción de bombas de infusión y torres para bombas de infusión notificará a tiempo a su jefe inmediato la dotación de formatos de recepción cuando éstos estén por terminarse.
- 3.12 Es responsabilidad del jefe de servicio o encargado, realizar el resguardo de la bitácora de recepción de bombas de infusión una vez agotadas las hojas o formatos.
- 3.13 Las bitácoras de recepción deberán mantenerse en condiciones de limpieza y cuidado, ya que son solicitadas como evidencia durante las auditorias para certificación de los programas de gastos catastróficos (seguro popular).
- 3.14 El personal responsable de la recepción de bombas de infusión y torres para bombas de infusión deberá pasar personalmente a cotejar en las salas o unidades de los pacientes que estén utilizando bombas de infusión, así como verificar la existencia en el almacén del servicio o área de resguardo para cotejar con los vales de préstamo y con el formato de control de bombas de infusión para revisión externa por proveedores (Anexo 2), a fin de conocer la disponibilidad de bombas y torres para bombas dentro del servicio, así como su ubicación.
- 3.15 En las salas o unidades donde se encuentren pacientes con aislamiento "Plus" o por "Gotas", se deberán tomar las medidas necesarias para entrar a la habitación o en su defecto, se le pedirá a la enfermera asignada al paciente que informe y confirme el total de bombas que utiliza el paciente, el número de control interno y el número de serie.
- 3.16 Es un deber recibir las bombas de infusión y torres para bombas de infusión con sus aditamentos para su uso y funcionamiento; por lo que los aditamentos son: cable de alimentación eléctrica, clamp de fijación y asa o agarradera. (Anexo 3)
- 3.17 Es responsabilidad del personal que utiliza las bombas de infusión conocer el "Procedimiento de Préstamo de Bombas de Infusión" para solicitar, requisitar, resguardar y cancelar correctamente el vale de préstamo.
- 3.18 Es responsabilidad del personal encargado de recibir las bombas de infusión y torres, notificar a su jefe inmediato al encontrar bombas rotuladas con alguna falla o desperfecto, con la finalidad de notificar de manera oportuna al personal de la empresa para su reparación.
- 3.19 Es responsabilidad del personal asignado para la recepción de bombas, informar al personal del turno anterior y al jefe o encargado, sobre faltantes de bombas y/o torres para bombas de infusión e iniciar el procedimiento de búsqueda.

		CONTROL	. DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Henrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento \de Enfermería	Subdirector de Atenc <u>ión Hospit</u> alaria y Consulta #xterna	Director General Adjunto Medico	Director General
Firma:	Structular Car	Vantuurit:		1/1/	
Fecha:	1 100	Agos	to 2018	9	



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión



REV:

00

HOJA: 4

DE: 21

- 3.20 El personal que hace entrega (Jefe de servicio o encargado y personal asignado para la recepción) serán los responsables de dar aviso del robo o extravío a la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Departamento de Almacenes, en un plazo no mayor de 24 horas a partir del momento en que se percatan del robo o extravío de la(s) bomba(s) y/o torre para bombas de infusión, acusando copia a las Subdirecciones de Servicios Generales y de Asuntos Jurídicos.
- 3.21 Es responsabilidad de los jefes o encargados de servicio y supervisoras, contar con la información correspondiente a la existencia y uso de las bombas de infusión, a fin de verificar que se realicen los procesos correctos para su manejo y control, así como dar seguimiento a aquellas que se prestaron a otros servicios o que se llevaron para su reparación o mantenimiento.

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo/ Meneses Gargia
Cargo-puesto:	Jeferde enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermerija	Subdirector de Atención Hospitalaria y/Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Shurter led Col.	Millitte		14	
Fecha:	1 00	Agos	to 2018	1	



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión



REV: 00

HOJA: 5

DE: 21

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN "SIN FALTANTES"

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
Jefes de servicio o encargados de los diferentes turnos y servicios	2	Elabora rol para asignar personal a su cargo en la recepción y entrega de bombas de infusión y torres para bombas de infusión al inicio y fin de turno. Informa al personal a su cargo como queda establecido el rol de distribución de actividades para la recepción de bombas de infusión y torres para bombas de infusión.	Rol de distribución de actividades
Enfermera (o) encargada (o) de la recepción del turno entrante	3 4 5	Toma conocimiento del rol de distribución de actividades y prepara la bitácora para la recepción de bombas que contiene el formato de recepción de bombas de infusión. Coteja en cada una de las habitaciones o unidades la existencia de bombas de infusión y/o torres para bombas de infusión y registra en bitácora de recepción (Formato de recepción de bombas de infusión) su lugar de ubicación. Verifica en el almacén del servicio o área de resguardo cotejando faltantes contra vales de préstamo y contra el formato de control de bombas de infusión para revisión externa por proveedores y determina. ¿Existen faltantes? No: Registra en bitácora de recepción (Formato de recepción de bombas de infusión) y la coloca nuevamente en el lugar designado para uso del nuevo turno. Pasa a la actividad número 9. Si: Informa a la Enfermera (o) encargada (o) de la recepción de bombas de infusión y/o torres para bombas de infusión y proceda conforme al "Procedimiento para recepción de bombas de infusión con faltantes".	 Rol de distribución de actividades Bitácora de recepción de bombas (formato de recepción de bombas de infusión) Vales de préstamo Formato de control de bombas de infusión para revisión externa por proveedores Procedimiento para recepción de bombas de infusión con faltantes".

		CONTROL	DE EMISIÓN		
ř.	Elabo	ró:	Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses Garçía
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento ∖de Enfermerija	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director general
Firma:	Strulevaller	WHILLIAME.		M	
Fecha:	1. 1. 1. 1.	0	to 2018		

SALUD SICREAGIA DE SALUB

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:

00

•

HOJA: 6

DE: 21

2. Procedimiento	para la recepción de bombas
	de infusión

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
Enformera (a)	8	Notifica a su jefe inmediato sobre faltantes de bombas de infusión y/o torres para bombas de infusión.	
Enfermera (o) encargada (o) de la recepción del turno entrante	9	Realiza enlace al final del turno con la Enfermera (o) encargada (o) de la recepción del turno entrante.	
	in programme of the second	TERMINA.	

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García/
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Trustiste Cel	· Williams		411	P
Fecha:		Agost	to 2018	1	



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



1 - 1

REV:

HOJA: 7

DE: 21

00

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión

4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN "CON FALTANTES"

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
Enfermera (o) encargada (o) de la recepción del turno entrante	1	Informa a la Enfermera (o) encargada (o) de la recepción de bombas del turno anterior, sobre faltantes de bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión.	апехо
	2 3 4 5		- Bitácora de recepción de bombas (formato de recepción de bombas de infusión) - Vales de préstamo
	8	Verifica que la enfermera encargada de la recepción de turno entrante registre en la bitácora la existencia de la (s) bomba (s) de infusión y torre (s) para bombas de infusión que fueron localizadas. Informa a su jefe inmediato de la entrega completa de la (s) bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión. Termina procedimiento.	

CONTROL DE EMISIÓN						
- 4 = 1	Elabo	ró:	Revis	ó:	Autorizó:	
Nombre:	L.E.O Angélica	Lic. Enf. Inés I.	Dr. Ángel Apollaca	Dır. Ángel	Dr. A. Abelardo	
Nombre.	González González	Mendoza Santos	Cruz /	Herrera Gómez	Meneses García	
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Medico	Director General	
Firma:	Stude Veller-	Millitte;		W		
Fecha:	. , , , ,	Agos	to 2018		/	

SALUD SICHE FARIA DE SAUD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:

00

HOJA: 8

DE: 21

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
Enfermera (o) encargada (o) de la recepción del turno anterior	9	SI: Informa a su jefe inmediato o supervisor en turno, sobre la perdida de la (s) bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión y procede conforme al procedimiento para presentar denuncia para la recuperación de bienes robados y/o extraviados propiedad del Instituto.	- Procedimiento para presentar denuncia para la recuperación de bienes robados y/o extraviados propiedad del Instituto
Jefes de servicio o encargados de los diferentes turnos y servicios	de S ac	Toma conocimiento la perdida de la (s) bomba (s) y/o torre para bomba de infusión y da aviso del robo o extravío mediante oficio a la Subdirección de Recursos Materiales, acusando copia a las Subdirecciones de Servicios Generales y de Asuntos Jurídicos.	- Oficio
	11	Elabora acta de bienes robados o extraviados y actúa conforme al procedimiento para presentar denuncia para la recuperación de bienes robados y/o extraviados propiedad del Instituto.	 Procedimiento para presentar denuncia para la recuperación de bienes robados y/o extraviados
	12	Verifica que se realicen los procesos correctos para el manejo y control de las bombas o torres para bomba de infusión.	propiedad del Instituto Acta de bienes robados o
	13	Da seguimiento a la(s) bombas de infusión y/o torres que se prestaron a otros servicios o que se envían para su reparación o mantenimiento.	extraviados
		TERMINA	

		CONTROL	DE EMISIÓN		
A SUBSTRUCT	Elaboró:		Revisó:		Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Apodaca	Dr. Ángel Herfera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Shutuly VIV	Munitary.		M2	
Fecha:	Agosto 2018				



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión



REV:


00

HOJA: 9

DE: 21

5. DIAGRAMA DE FLUJO

4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN "SIN FALTANTES"

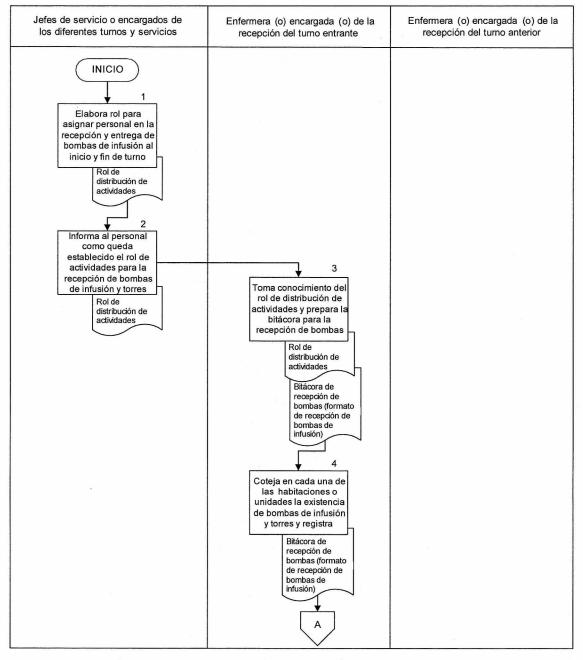

		CONTROL	DE EMISIÓN	*	
	Elaboró:		Revisó:		Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermeria	Subdirector de Atención Hosottalaria y Consulta ≣xterva	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Sneuth Day Cy.	Hallleltte:		Wo	
Fecha:	Agosto 2018				
			1		

SALUD SCHEMBER OF MIRES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)




REV:

00

HOJA: 10

DE: 21

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión

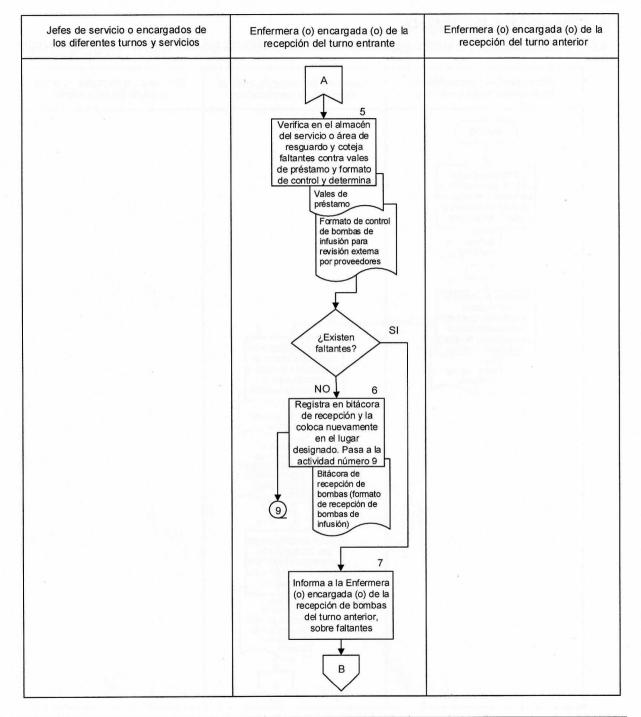

		CONTROL	DE EMISIÓN		
NUSS IS AL	Elaboró:		Revisó:		Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Medico	Director General
Firma:	Trustel UPH W	1 WHILLIATE		W.	
Fecha:	Agosto 2018			4/	



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

Na Care


REV:

00

HOJA: 11

DE: 21

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión

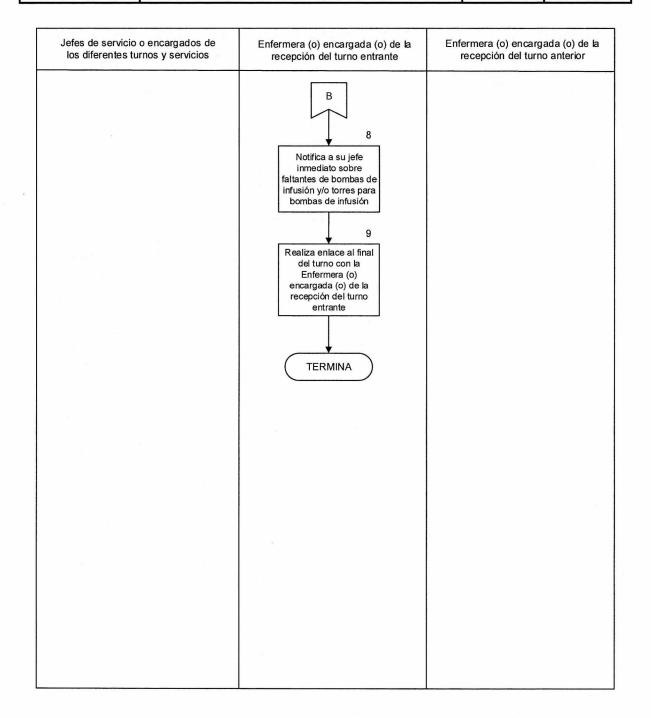

		CONTROL	. DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica Lic. Enf. Inés I. González González Mendoza Santos		Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardø Meneseş Gargia
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Strate Clerkey	William .	#	1/2	
Fecha:	1,400)	Agos	to 2018	0	

SALUD SKREGRADENDE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión



REV:


00

UU

HOJA: 12

DE: 21

4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN "CON FALTANTES"

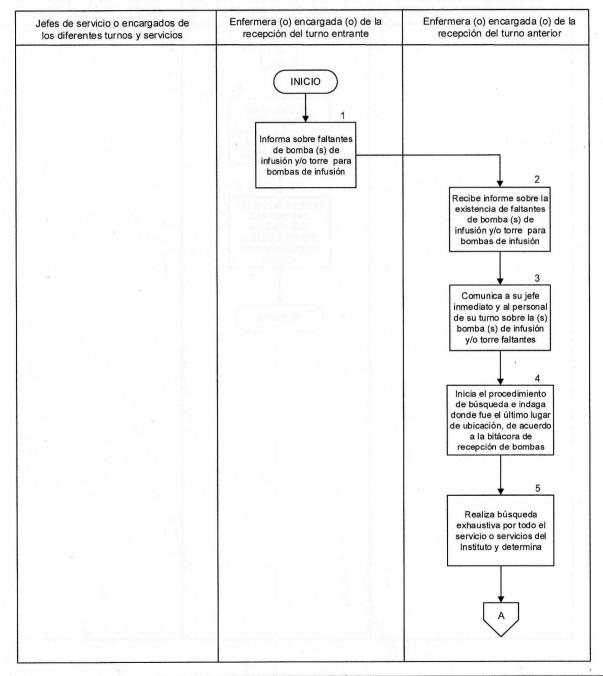

		CONTROL	DE EMISIÓN		
All Sand	Elabo	ró:	Revisó:		
Nombre:	L.E.O Angélica Lic. Enf. Inés I. Dr. Ángel Apodaca (Dr. Ángel González González Mendoza Santos (Cruz Herrera Gómez				Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras Jefa del Departamento de Enfermería		Su <u>bdirector</u> de Atención Hospitalans y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Directo Seneral
Firma:	Strutulally	Milliante:		NY	
Fecha:	1000	Agos	to 2018		



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión




REV:

00

HOJA: 13

DE: 21

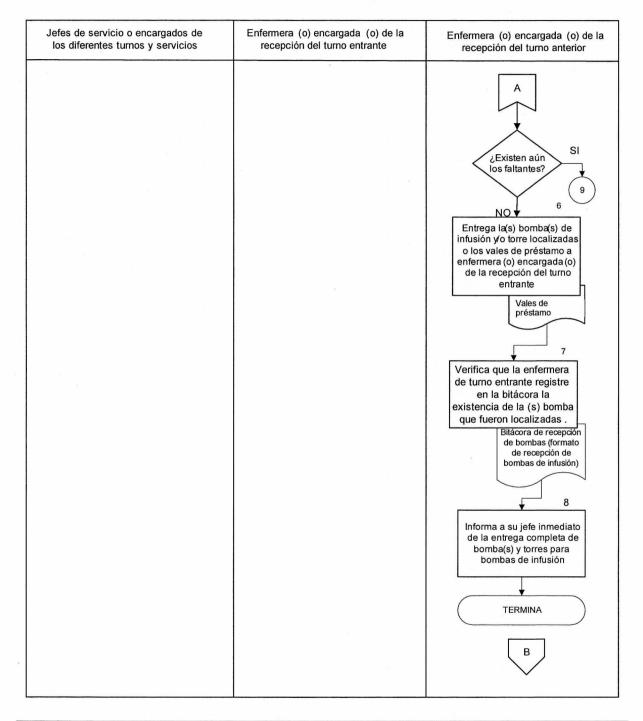

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica	Lic. Enf. Inés I.	Dr. Ángel Apodaca	Dr. Ángel	Dr. A. Abelardo
	González González	Mendoza Santos	Eruz /	Herrera Gómez	Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta #xterna	Director General Adjunto Médico	Director Seneral
Firma:	Shuttaker Well	Villimit.		1/1/	
Fecha:	1	Agos	to 2018		

SALUD (SCHERGE DE MIUS)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)




REV:

00

HOJA: 14

DE: 21

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión

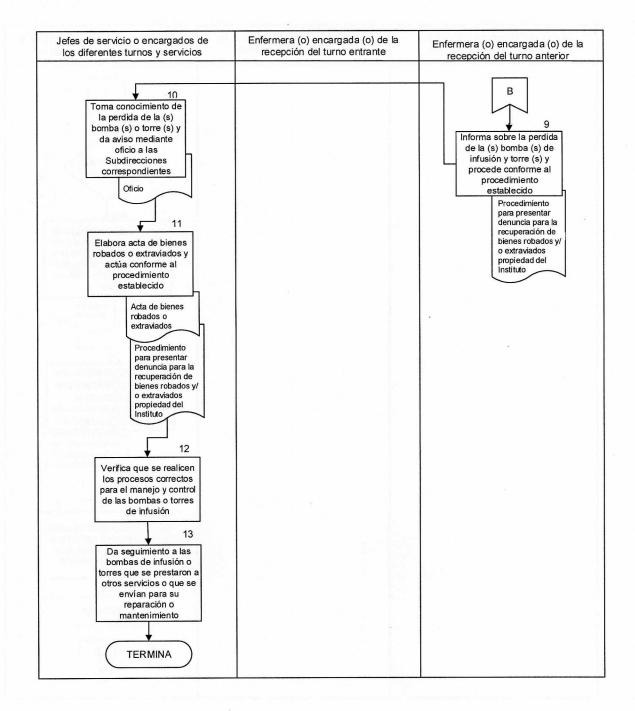

		CONTROL	DE EMISIÓN			
	Elabo	ró:	Reviso	5 :	Autorizó:	
Nombre:	L.E.O Angélica González González			Dr Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García Director General	
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras "B" "A A A A A De Enfermería		Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Medico		
Firma:	Shulderles	WHILLIAME.		49		
Fecha:	7 10	Agost	to 2018	1		



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión



REV:

00

HOJA: 15

DE: 21

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos	Código (cuando aplique)
6.1 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal	N/P
6.2 Ley de los Institutos Nacionales de Salud	N/P
6.3 Reglamento Interior de la Secretaria de Salud	N/P
6.4 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	N/P
6.5 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	N/P
6.6 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	N/P
6.7 Estatuto Orgánico y Decreto de creación del Instituto Nacional de Cancerología	N/P
6.8 Estructura Orgánica Autorizada, vigente (Estructura, dictamen y oficio de la SFP)	N/P
6.9 Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente	N/P
6.10 Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología vigente	N/P
6.11 Procedimiento para el préstamo de bombas de infusión dentro del INCan	N/P
6.12 Procedimiento para presentar denuncia para la recuperación de bienes robados y/o extraviados propiedad del Instituto	MPG-INCAN-2005
6.13 NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.	N/P

7. REGISTROS

Registros	Tiempo de Conservación	Responsable de Conservario	Código de Registro o Identificación Única
Rol de distribución de actividades	1 año	Jefes de servicio	N/A
Vale de préstamo de bombas de infusión	1 año	Jefes de servicio	N/A
Bitácora de recepción de bombas	1 año	Jefes de servicio	N/A
Formato de control de bombas de infusión para revisión externa por proveedores	1 año	Jefes de servicio	N/A

CONTROL DE EMISIÓN						
	Elabo	ró:	Reviso	5:	Autorizó:	
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García	
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras "B"	Jefa del Departamento de Enfermería	Súbdi rector de Atención Hosotalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General	
Firma:	And ditteller	· Allunate.		1/0		
Fecha:	1/1 9 1	Agos	to 2018	0/	/	

SALUD SCHEGGE DE SALUD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión



REV:

HOJA: 16

00

DE: 21

8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO

8.1 Bitácora de recepción:

Archivo en el cual se lleva un registro de bienes de manera diaria, semanal o mensual de la tarea asignada a una persona o equipos de trabajo; la cual funciona como un check list.

8.2 Bomba de Infusión:

Dispositivo electrónico computarizado capaz de suministrar, mediante su programación y de manera controlada, una determinada cantidad de soluciones endovenosas con a sin fármacos agregados (infusiones parenterales) u oral (infusiones enterales) a pacientes que por su condición así lo requieran.

8.3 Consolidado de entrega:

Listado en el cual se agrupa la mercancía o producto para ser entregados bajo un mismo documento. La empresa es la responsable de hacer entrega del listado.

8.4 Encargada (o) de servicio:

Persona a quien se le ha delegado la autoridad ante la ausencia programada o no programada de un jefe o personal de confianza, se encarga de gestionar, administrar y control al recurso humano, material y financiero del servicio, además de ejercer un liderazgo efectivo con el grupo de trabajo.

8.5 Número de control interno:

Número progresivo que se asigna a cada una de las bombas de infusión considerando iniciar desde el 1 hasta número total de bombas asignadas al servicio.

8.6 Torre para bomba de infusión: Equipo electro médico el cual está diseñado para concentrar más de dos bombas de infusión de manera ordenada, ocupando menor espacio y son alimentadas por un solo cable de corriente eléctrica.

8.7 Vale de préstamo:

Documento oficial en el cual se concentran los datos del personal responsable de solicitar, autorizar y dar trámite al préstamo de un bien o equipo propiedad del Instituto y que además se encuentra bajo el resguardo y cuidado del personal que lo utiliza.

9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

Número de Revisión	Fecha de la Actualización	Descripción del Cambio	
No aplica	No aplica	No aplica	

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enferme(la	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Structalelle	William.	1	dil	
Fecha:	1 10	Agost	to 2018	10	



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión



REV:

00

HOJA: 17

DE: 21

10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO

- 10.1 Anexo 1 Formato para la Recepción de Bombas de Infusión.
- 10.2 Anexo 2 Formato de control de bombas de infusión para revisión externa por proveedores.
- 10.3 Anexo 3 Aditamentos de Bomba de Infusión.

ANEXO 1 FORMATO PARA LA RECEPCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA Y CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RECEPCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMAT MC AGILIA E

SERVICIO: ROTULADO CON EL NOMBRE DE CADA SERVICO

No.	Número de	Fecha			Fecha			Fecha		
control interno	serie	TM	τv	TN	TM	TV	TN	TM	TV	TN
1	22535645									
2	22535720									
3	22535623									
4	22442150									
5	22537331									
6	22536020									
7	22441669									
8	22537287									
9	22537297									
10	22537325									
11	22537289									
12	22535622									
13	22535638									
14	22535732									
15	22535996									
	1									
Nombre o	de quién recibe				- T		1 1 2 1			

		CONTROL	. DE ĘMÎIS	IÓN		
	Elabo	ró:		Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica	Lic. Enf. Inés I.	/ Dr. Ánge	Apodaca	Dr. Ángel	Dr. A. Abelardo
Nonible.	González González	Mendoza Santos	/ ·c	ΨZ	Heriera Gómez	Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermeria	Atención I	ector de lospitalaria ta Externa	Director General Adjunto Medico	Director General
Firma:	Strutatelle	VIIIIIIII .			M	
Fecha:		Agos	to 2018		0	



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión



REV:

HOJA: 18

00

DE: 21

Instructivo para el llenado del formato

"RECEPCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN"

Objetivo:

Contar con una herramienta en la cual quede plasmada la ubicación de cada una de las bombas de infusión en cada uno de los servicios.

Item -	Descripción
Servicio	Los formatos ya cuentan con el nombre del servicio impreso, por lo cual no deberá agregarse más información.
No. control interno	Se refiere al número progresivo desde el número 1 hasta el número según el total de las bombas asignadas al servicio. El formato ya cuenta con dicha información, sin embargo, en caso de incrementar el número de bombas se dará continuidad a la numeración hasta contabilizar el total de bombas dentro del servicio.
Número de serie	En este ítem se encuentran registrados los números de serie de cada una de las bombas. Cada bomba debe contar con el número de control interno y coincidir con el número de serie según el listado. En caso de incrementar el número de bombas se registrará el número de serie en el lugar correspondiente.
Fecha	Anotar el día, mes y año en que se realiza la recepción. Los formatos tienen espacio para registrar la información de 5 días de la semana, a excepción del 7º piso de hospitalización que únicamente cuenta con espacio para tres días.
Rectángulos con diagonal	 Cada rectángulo formado por las columnas y filas cuenta con una línea diagonal que lo divide en dos partes. Los triángulos que se forman de la división del rectángulo son los espacios donde se registrará la información obtenida durante la recepción, la cual se hará de la siguiente manera: Anotar en el primer espacio el número de cama o la sigla A Almacén del servicio, F = Faltante, M = Mantenimiento por la empresa o VP = Vale de Préstamo, de acuerdo a la ubicación de la bomba de infusión al inicio de turno. Si la bomba de infusión cambió de lugar durante el turno en curso se registrará en el segundo espacio En caso de continuar la bomba con el mismo paciente o lugar no se registrará nada en ese segundo espacio.

		CONTROL	. DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermenta	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Struth Waller.	MANAGE:		W	
Fecha:	1.70	Agos	to 2018	la	



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

REV:

00

HOJA: 19

DE: 21

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión

TM TV TN	Son las abreviaturas de: Turno Matutino, Turno Vespertino y Turno Nocturno. En estas columna el personal asignado para la recepción de bombas de infusión del turno en cuestión registrará la información obtenida durante la recepción
Filas en blanco	debiendo llenar todos los espacios. Las filas en blanco son espacios disponibles para poder anotar el número de control interno y el número de serie de aquellas bombas de infusión que hayan sido prestadas de otros servicios. De ésta manera se conocerá cuantas bombas de infusión de otros servicios hay y los lugares de ubicación. De igual manera se anotara por cada turno la ubicación de la misma hasta que se haya regresado a su servicio de origen.
Nombre de quien recibe	La persona que recibe debe anotar su nombre y un apellido al final del listado del turno que recibe.

CONTROL DE EMISIÓN									
	Elabo	ró:	Revise	ó:	Autorizó:				
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Appdaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García				
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermer[a	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta/Externa	Director General Adjunto Medico	Director General				
Firma:	Shartitou W	WHILLIAME"		2/2	JV				
Fecha:),,0	Agos	to 2018						

SALUD NICEE FABIA DE SALUD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión



REV:

00

HOJA: 20

DE: 21

ANEXO 2 FORMATO DE CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN PARA REVISIÓN EXTERNA POR PROVEEDORES



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA Y CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

FORMATO DE CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN PARA REVISIÓN EXTERNA POR PROVEEDORES

No. Control interno	No. Serie	Motivo de salida	Fecha de salida	Nombre de quién recoge la bomba (empresa)	Nombre de quién da salida a la bomba (INCan)	Fecha de entrega de bomba reparada	Nombre de quién recibe (INCAD)	Nombre de quien entrega (empresa)	Observaciones
							-		***************************************
							147,77		

		CONTROL	. DE EMISIÓN			
	Elabo	ró:	Revis	ó:	Autorizó:	
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses Garçía	
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de, Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Medico	Director Ceneral	
Firma:	Charles Delly	Mumme:	#	di		
Fecha:	/ / / /	Agos	to 2018			

LUD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

2. Procedimiento para la recepción de bombas de infusión




REV:

00

HOJA: 21

DE: 21

ANEXO 3 ADITAMENTOS DE BOMBA DE INFUSIÓN

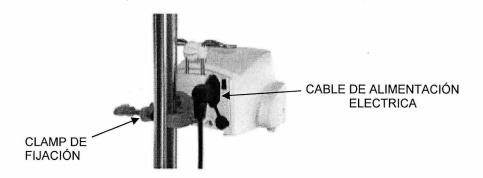



ASA O AGARRADERA

CONTROL DE EMISIÓN									
	Elabo	ró:	Revise	ó:	Autorizó:				
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García				
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermerfa	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Medico	Director General				
Firma:	How tait bely	Mullitut		1/1/					
Fecha:	/	Agost	to 2018						



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

3. Procedimiento para el manejo y cuidado de bombas de infusión



REV:

00

HOJA: 1

DE: 21

3. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CUIDADO DE BOMBAS DE INFUSIÓN

		CONTROL	. DE EMISIÓN	N .		
	Elabo	ró:		Revisó:		Autorizo:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Ap Cruz		Dr Ángel rrera Gómez	Dr. A Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirecto Atención Hosp y Consulta	italaria Dir	ector General junto Médico	Director General
Firma:	Studiell	Attitute.			. 1	
Fecha:			to 2018			



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

bombas de infusión

3. Procedimiento para el manejo y cuidado de

REV:

00

HOJA: 2

DE: 21

1. **PROPÓSITO**

Establecer las medidas necesarias que permitan garantizar un buen manejo y cuidado de las bombas de infusión por parte del personal que interviene de manera directa o indirecta en su uso.

2. **ALCANCE**

- A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Enfermería, a través del personal 2.1 de enfermería: así como a médicos, camilleros, técnicos y personal de intendencia del INCan en los diferentes turnos y servicios.
- A nivel externo el procedimiento es aplicable al personal de la empresa proveedora de bombas 2.2 de infusión.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.

- 3.1 El personal implicado en el manejo y uso de bombas de infusión es el responsable de cumplir con este procedimiento y de mantenerlo actualizado.
- Es responsabilidad del personal de enfermería, médicos, camilleros, técnicos y personal de 3.2 intendencia hacer y dar buen uso a las bombas de infusión y torres para bombas de infusión que estén en uso con pacientes o bajo resguardo en almacén.
- Es responsabilidad del personal médico, de enfermería, camilleros o técnicos informar 3.3 inmediatamente al jefe de servicio o encargado, sobre las fallas presentadas en el funcionamiento de las bombas de infusión para su pronta reparación.
- Los jefes de servicio o encargados de los diferentes turno y servicios, serán los responsables de 3.4 designar un área de resquardo donde se concentren las bombas de infusión y torres para bombas de infusión que no estén siendo ocupadas con los pacientes.
- Es responsabilidad de los jefes de servicio o encargados de los diferentes turno y servicios, contar 3.5 con la información correspondiente a la existencia y uso de las bombas de infusión, así como verificar que se realicen los procesos correctos para su manejo, uso y control.
- Es responsabilidad del personal de enfermería lo siguiente: 3.6
 - 3.6.1 Conocer el manejo correcto de las bombas de infusión antes de ser utilizadas por primera
 - 3.6.2 Realizar la programación correcta de la bomba de infusión e informar al paciente, familiar o cuidador primario que informe ante la activación de la alarma.
 - 3.6.3 Informar al familiar del paciente o cuidador primario, que queda estrictamente prohibido manipular la bomba de infusión al activarse la alarma.
 - 3.6.4 Informar al paciente y familiar o cuidador primario, que durante el baño de regadera evite al máximo que las bombas de infusión se humedezcan o mojen.

		CONTROL	DE EMISIÓN		//	
	Elabo	ró:	Revis	só:	\ \	Autorizó:/
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Merrera		Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento ≬de Enfermeria	Subd irector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director Adjunto		Director General
Firma:	Stratules W	Williamitte				
Fecha:	117	Agos	to 2018			



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

ON COLUMN OF THE PROPERTY OF T

REV:

00

HOJA: 3

DE: 21

- 3.6.5 Realizar buenas prácticas para prevenir infecciones cruzadas a través de equipo electro médico.
 - La bomba de infusión forma parte del entorno cercano del paciente, por lo que es un deber limpiar y desinfectar diariamente las superficies externas del aparato para proteger al paciente, así como al personal de los riesgos de contaminación.
- 3.6.6 Informar al personal de intendencia, a cargo del Departamento de Servicios, que realice la limpieza de las bombas de infusión de acuerdo a recomendaciones del fabricante (anexo 1) y con toallas de oxivir ante el uso con pacientes infectocontagiosos y dejar en la habitación durante la sanitización.
- 3.6.7 Notificar a su jefe inmediato cuando una bomba de infusión haya sufrido una caída o haya recibido un golpe que pudiera dañar su funcionamiento, por lo que deberá rotular la bomba de infusión, mencionar el motivo del rotulo y dar aviso a la empresa proveedora de bombas de infusión para su revisión y/o reparación.
- 3.6.8 Rotular las bombas de infusión que se encuentren con alguna falla, mencionando la problemática existente, para evitar que sea utilizada ocasionando pérdidas de tiempo o eventos adversos en los pacientes.
- 3.7 Las bombas de infusión y torres para bombas de infusión independientemente de estar en funcionamiento o en resguardo, deben mantenerse conectadas a la corriente eléctrica para evitar descarga de la batería y por consiguiente apagado de la misma durante su uso.
- 3.8 Es responsabilidad de los camilleros que trasladan pacientes a los diferentes servicios para estudios de imagen de diagnóstico o tratamiento, y que cuentan con bomba de infusión, dar un buen uso y verificar su funcionamiento durante el traslado.
- 3.9 El personal de intendencia, a cargo del Departamento de Servicios, que realiza aseo exhaustivo en las habitaciones evitará mojar las bombas de infusión o dar mal uso al cambiarlas de lugar para realizar la limpieza.
- 3.10 Las bombas de infusión que se desocupan deberán colocarse en orden, previa limpieza, en el área asignada para su resguardo.
- 3.11 La empresa proveedora de bombas de infusión, es responsable de brindar capacitación del funcionamiento de las bombas de infusión y de las torres para bomba de infusión de acuerdo a la petición realizada por la Jefatura del Departamento de Enfermería las veces que se consideren necesarias, hasta que haya quedado dominado el conocimiento en el uso de las mismas; así como atender a las observaciones hechas por el personal que las maneja.
- 3.12 Es responsabilidad de la empresa proveedora de bombas de infusión, dar mantenimiento preventivo de acuerdo a la calendarización establecida, así como colocar marbete con información referente al mantenimiento realizado. (Anexo 2)
- 3.13 Por ningún motivo se deberá utilizar una bomba que no haya sido revisada o reparada por la empresa proveedora de bombas de infusión.
- 3.14 Los jefes de servicio o encargados de los diferentes turno y servicios, serán los responsables de verificar que el personal a su cargo cumpla las políticas establecidas para éste procedimiento.

		CONTROL	DE EMISIÓN			,
	Elabo	oró:	Revi	só:		Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ar Herrera	911	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Aténción Hospitalaria y Consulta Externa	Director C Adjunto		Director General
Firma:	Structor WV	MHHHHHE"				/
Fecha:	777	Agost	to 2018			

SALUD STATEMENT STATEMENT

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

3. Procedimiento para el manejo y cuidado de bombas de infusión



REV:

00

HOJA: 4

DE: 21

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
Empresa proveedora de bombas de infusión	1	Capacita al personal de enfermería en el manejo y uso de la bomba de infusión, de conformidad a la calendarización de actividades.	- Calendarización de actividades
	2	Elaboran listado de capacitación en el manejo de bombas de infusión y archivan para su control.	
	3	Dan seguimiento al uso adecuado de las bombas de infusión y determinan:	
Jefes de servicio o		¿El personal de enfermería usa adecuadamente las bombas de infusión?	- Listado de capacitación en el
encargados de los diferentes turnos y servicios	4	No: Solicitan a la empresa proveedora de bombas de infusión que se realice la capacitación correspondiente, así como la presentación de calendarización de actividades. Regresa a la actividad número 1.	manejo de bombas de infusión
	5	Si: Verifican que los procesos para el manejo, uso adecuado y control de las bombas de infusión se realice correctamente.	
	6	Instala, conecta y programa la (s) bomba (s) de infusión.	
	7	Informa al paciente que debe dar aviso, en caso de activación de la alarma de la bomba de infusión, a fin de que acudan a revisarla.	
Personal de enfermería	8	Verifica durante el turno, el funcionamiento de la bomba de infusión de acuerdo a lo programado.	- Indicaciones médicas
	9	Realiza los ajustes necesarios en la bomba de infusión de acuerdo a la indicación y tratamiento médico.	
			A

		CONTROL	DE EMISIÓ	N		/ \	
	Elabo	ró:		Revise	ó: Y	V	Autorizó:/
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel A Cruz	. /		Angel Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirect Atención Hos y Consulta	pitalaria		General Médico	Director General
Firma:	material	THUME!					
Fecha:	1	Agos	to 2018				/



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

A September 1 Sept

REV:

00

HOJA: 5

DE: 21

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
Personal de enfermería	10	Informa al camillero, en caso de que el paciente requiera ser trasladado a otra área o servicio de conformidad a las indicaciones médicas.	
	11	Toma conocimiento e informa al paciente sobre su traslado de acuerdo a las indicaciones médicas.	
, ,	12	Confirma con la enfermera, que equipos pueden ser desconectados de la bomba de infusión y cuáles no.	- Indicaciones
Camillero	13	Verifica el funcionamiento de la bomba de infusión durante el traslado, de conformidad al procedimiento para el traslado de pacientes con bombas de infusión.	médicas - Procedimiento para el traslado de pacientes con
	14	Conecta cable de alimentación eléctrica de la bomba de infusión, al regreso del traslado del paciente.	bombas de infusión
	15	Da aviso a la enfermera para que instale los equipos a las bombas de infusión que se desconectaron.	
	16	Toma conocimiento para colocar equipo (s) y programar bomba (s) de infusión.	
	17	Revisa indicaciones médicas, así como hojas de registros de enfermería y determina:	
Personal de		¿Termina uso de la bomba de infusión?	- Indicaciones médicas
enfermería	18	No: Realiza limpieza de la bomba de infusión con toallas de oxivir y continua su uso con el paciente. Regresa a la actividad número 17.	- Hojas de registros de enfermería
	19	Si: Retira equipos, verifica que el paciente que desocupe la bomba de infusión no tenga una enfermedad infectocontagiosa.	

		CONTROL	DE EMISIÓN		1	
	Elabo	ró:	Re	evisó:		Autorizó:/
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz		Ángel a Gømez	Dr. A. Abelardo Menèses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalar y Consulta Externa	ria Adiun	r General to Médico	Director General
Firma:	Smitter	AMMINTE"	1	Yes The		
Fecha:	11111111	Agos	to 2018			/



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



00

REV:

HOJA: 6

DE: 21

3. Pr	ocedimiento para el manejo y cuidado de
	bombas de infusión

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
Personal de enfermería	20	Informa al personal de intendencia que realice la limpieza normal de la bomba de infusión ó desinfección en caso de haber sido utilizada por un paciente con enfermedad infectocontagiosa.	Processor Contracts
Subdirección de Servicios Generales, a través del Departamento de Servicios (Personal de Intendencia)	21 22 23 24 25	Toma conocimiento y determina si la limpieza a la bomba de infusión será normal o desinfección: ¿Fue utilizada por un paciente con enfermedad infectocontagiosa? No: Realiza la limpieza normal de la bomba de infusión de acuerdo a recomendaciones del fabricante (anexo 1). Pasa a la actividad número 25. Si: Realiza la desinfección de la bomba de infusión con toallas de oxivir ante el uso con pacientes infectocontagiosos. Deja la bomba limpia en la unidad hasta su sanitización. Informa al personal de enfermería que la bomba de infusión está limpia.	- Anexo 1 Recomendaciones de Limpieza
Personal de enfermería	26 27 28 29	Toma conocimiento y coloca bomba de infusión completa, limpia y en su caso sanitizada, en el área de resguardo. Detecta que la bomba de infusión presenta falla, caída o golpe y notifica a su jefe inmediato. Rotula la bomba de infusión, mencionando el motivo del rotulo y da aviso al jefe de servicio o encargada (o) para que se realice su revisión y/o reparación. Realiza el registro correspondiente en el Formato de control de bombas de infusión para revisión externa por proveedores.	Formato de control de bombas de infusión para revisión externa por proveedores

		CONTROL	DE EMISIÓN		/	
	Elabo	ró:	Revis		Autorizó:/	
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Angel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García	
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermeria	Subdirector/de Atención Hospitalaria y Consulta Externa)	Director General Adjunto Médico	Director General	
Firma:	Shorthethely	MHHHHHE.				
Fecha:	100	Agos	to 2018			



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

PACE CHO AND OR ELL

DE:

REV:

HOJA: 7

00

21

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
Jefe de servicio o encargada de los diferentes turnos o servicios	30	Recibe informe y notifica vía telefónica a la empresa proveedora sobre las fallas en la (s) bomba (s) de infusión. Hace entrega de la (s) bomba (s) de infusión con fallas para su mantenimiento correctivo, mediante el formato de control de bombas de infusión para revisión externa por proveedores.	- Formato de control de bombas de infusión para revisión externa por proveedores
Empresa proveedora de bombas de infusión	32 33 34	Acude al área o servicio correspondiente y recoge bomba (s) de infusión para mantenimiento correctivo, mediante solicitud de salida de equipo. Realiza mantenimiento de fallas encontradas. Acude nuevamente al área o servicio correspondiente, hace entrega de la (s) bomba (s) de infusión con fallas corregidas y solicita firma de recibido en la solicitud de salida de equipo.	- Solicitud de salida de equipo
Jefe de servicio o encargada de los diferentes turnos o servicios Recibe bomba (s) de infusión con fallas corregidas y firma de recibido en la solicitud de salida de equipo. Realiza registro en el formato de recepción de bombas de infusión y coloca la (s) bomba (s) de infusión en el área de resguardo correspondiente. TERMINA		Formato de recepción de bombas de infusión	

		CONTROL	DE EMISIÓN	٧	V	1	
. 1	Elabo	ró:		Reviso	ó: "\		Autori ż ó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Ap Cruz	odaca	Dr. A Herrera	ngel Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermenta	Subdirecto Atención Hos y Consulta E	italaria)	Director Adjunto		Director General
Firma:	Stratularly	Munut &					
Fecha:	TNO	Agost	to 2018				/

SALUD SCETTABLE MAID

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

3. Procedimiento para el manejo y cuidado de bombas de infusión




REV:

00

HOJA: 8

DE: 21

5. DIAGRAMA DE FLUJO:

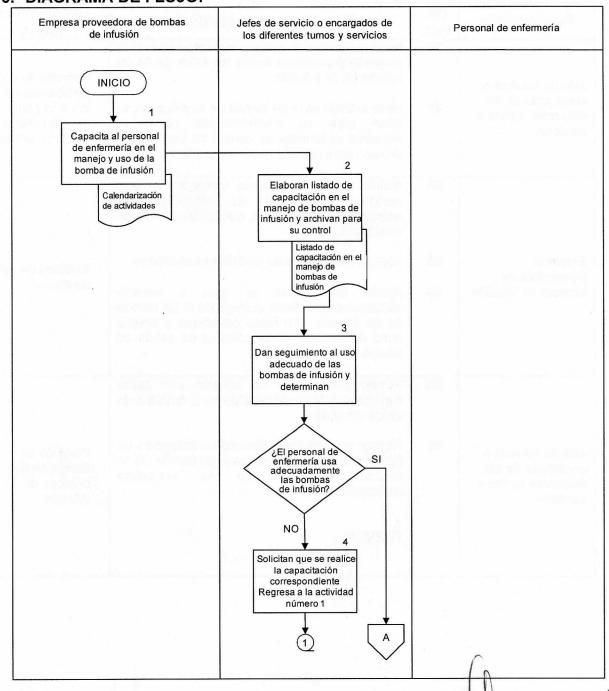

		CONTROL	DE EMISIÓN		1/
	Elabo	ró:	Revis		Autorizé:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Ápodaca Ćruz	Dr. Angel Herrera Gómez	Dr. A Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospital aria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Stralaballe	WHILLIAM :			1
Fecha:	1.110	Agos	to 2018		

SALUD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)




REV:

DE:

00

21

HOJA: 9

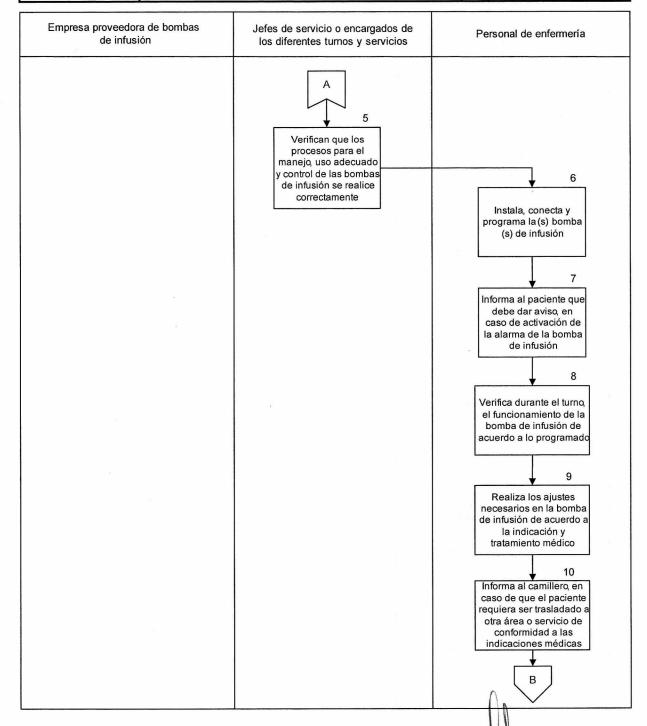

van saanta saaraa s		CONTROL	DE EMISIÓN				
	Elabo	ró:		Revis	Revisó:		Autorizó:/
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Apo Cruz	daca	Dr. √ Ar Herrera	P	Dr. A. Abelardo Meneses Carcía
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector Atención Hospi y Consulta Ex	talaria	Director (Adjunto I		Director General
Firma:	Struttered	Junitité.		T		1	
Fecha:	2.4.70	Agos	to 2018				/

SALUD NOFTERBADE MARIO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)




REV:

00

HOJA: 10

DE: 21

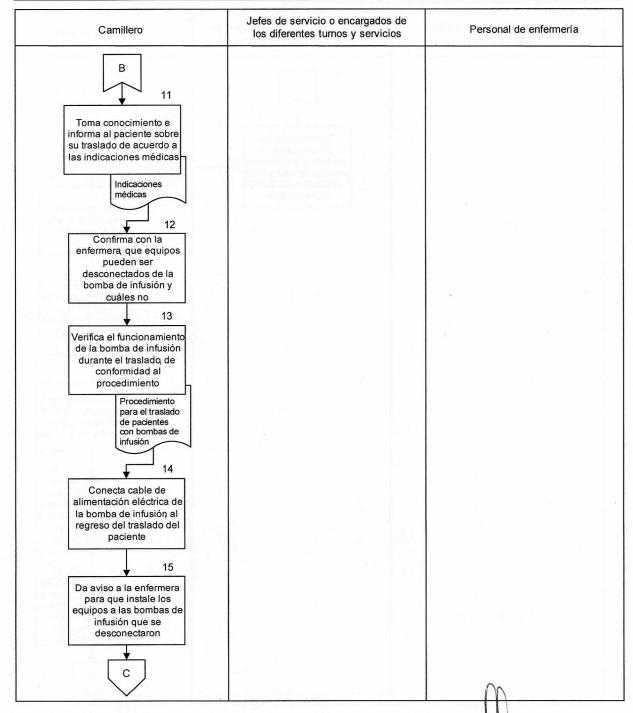

		CONTROL	DE EMISIÓN	1/\	./
	Elabo	ró:	Revis		Autorizø:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Appdaca Cruz	Dr. Ángel \ Herrera Gamez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalacia y Consulta Externa)	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Street at the Coll	HILLIUL "	1 1/	U	/
Fecha:	1	Agos	to 2018		

SALUD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)





REV:

00

HOJA: 11

DE: 21

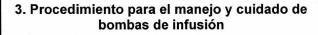

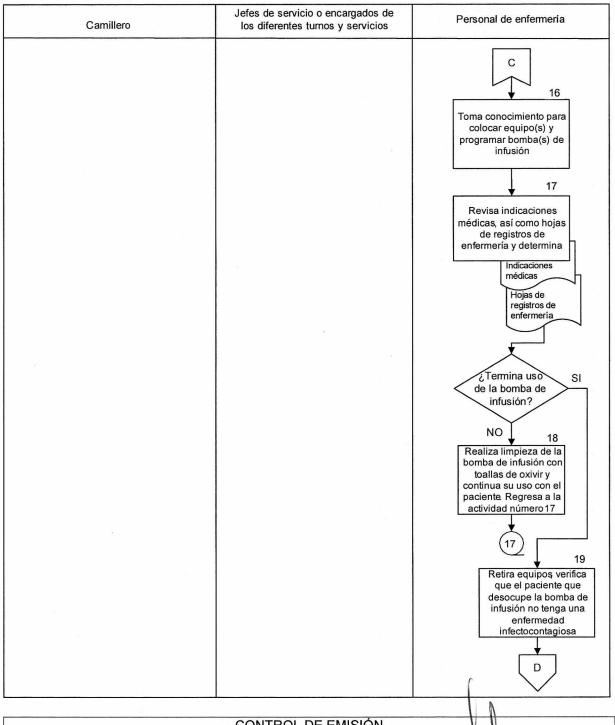

		CONTROL	. DE EMISIÓ	Ν	V	V	4
	Elabo	ró:		Revis	ó:	٨,	Autorizó!
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel A Cruz		Dr Ar Herrera C	10	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermenta	Subdirec Atención Ho y Consulta	pitalaria	Director C Adjunto M		Director General
Firma:	Shull lay	ALLLLL TO	1		1 1 1 1 1 1		
Fecha:		Agos	to 2018	1			,

SALUD SICKFEREND FINANCE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV: 00

HOJA: 12

DE: 21

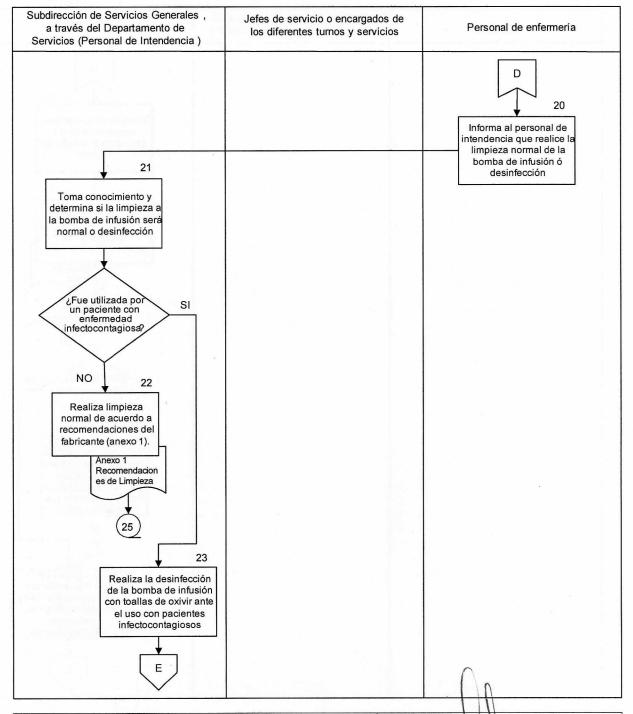

		CONTROL	. DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	ó: \/ J	Autorizó;
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermeria	Sub direct or de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Trush Custo	WHILLIE.			
Fecha:	0	Agos	to 2018		,

SALUD STREET

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)




REV:

00

HOJA: 13

DE:

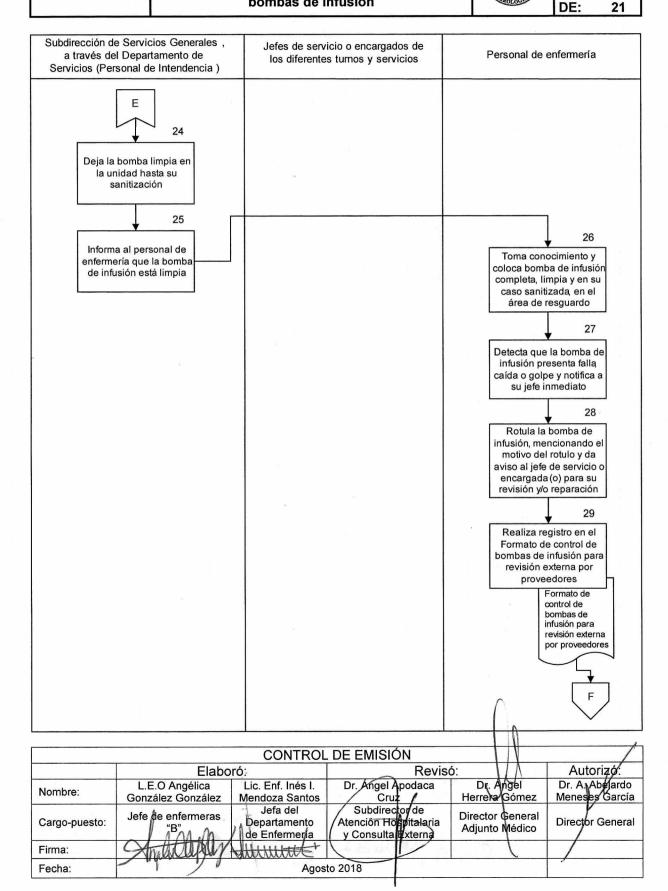

SALUD STCSETTABLE DE MALCE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV: 00

HOJA: 14

DE: 21

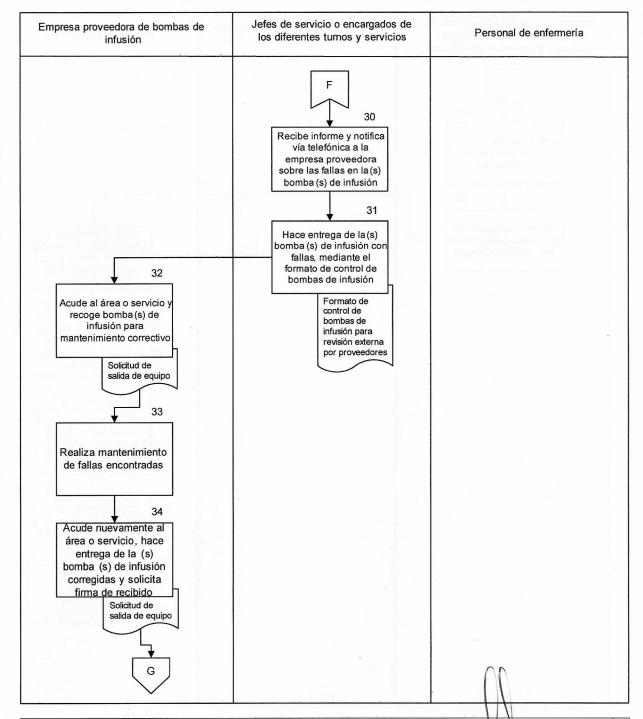

		CONTROL	. DE EMISIÓN	1		1 1	
	Elaboró: Revisó:		ó:	V	Autoriző:		
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Ap Cruz	daca	Dr. Ó	+	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermeria	Subdirecto Atención Hos y Consulta B	talaria	Director C Adjunto I		Director General
Firma:	XMAXUXXX	Juliuntité.			THUS	U	
Fecha:	11190	Agos	to 2018				

ALUD (

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)




REV:

00

HOJA: 15

DE: 21

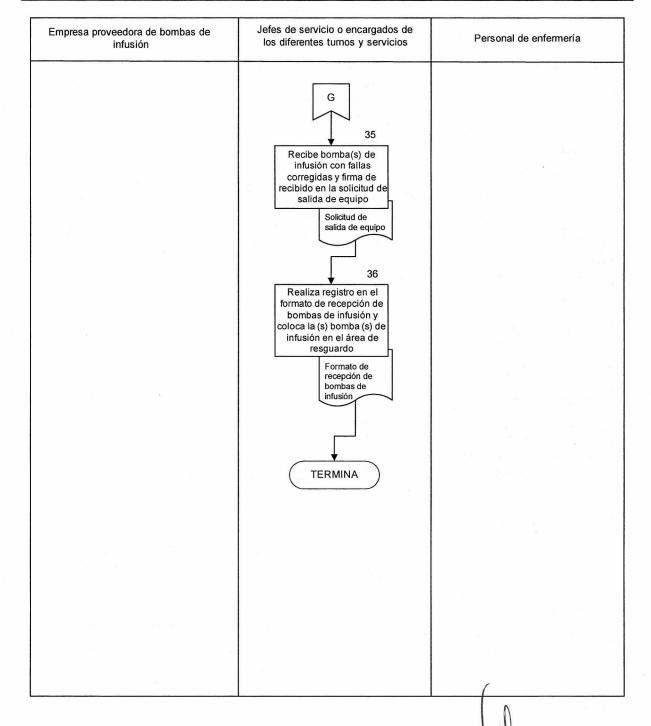

	The state of the s	CONTROL	DE EMISIÓN	1 IV	
6	Elabo	ró:	Reviso	5: \ \ \ \ \	Autorizó/
Nombre:	L.E.O Angélica	Lic. Enf. Inés I.	Dr. Ángel Apodaca	Dr Angel	Dr. A. Abelardo
	González González	Mendoza Santos	/ Cruz	Herrera Gómez	Meneşes García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector/de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Shithan	AMMMA:			
Fecha:	11/0-1	Agos	to 2018		

UD (S)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

3. Procedimiento para el manejo y cuidado de bombas de infusión



REV:

HOJA: 16

00

DE: 21

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos	Código (cuando aplique)
6.1 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal	N/P
6.2 Ley de los Institutos Nacionales de Salud	N/P
6.3 Reglamento Interior de la Secretaria de Salud	N/P
6.4 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	N/P
6.5 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	N/P
6.6 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	N/P
6.7 Estatuto Orgánico y Decreto de creación del Instituto Nacional de Cancerología	N/P
6.8 Estructura Orgánica Autorizada, vigente (Estructura, dictamen y oficio de la SFP)	N/P
6.9 Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente	N/P
6.10 Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología vigente	N/P
6.11 Procedimiento para el préstamo de bombas de infusión dentro del INCan	N/P
6.12 Procedimiento para presentar denuncia para la recuperación de bienes robados y/o extraviados propiedad del Instituto	MPG-INCAN-2005
6.13 NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.	N/P

7. REGISTROS

Registros	Tiempo de Conservación	Responsable de Conservarlo	Código de Registro o Identificación Única
Listado de capacitación en el manejo de bombas de infusión	1 año	Jefes de servicio	N/A
Formato de control de bombas de infusión para revisión externa por proveedores	1 año	Jefes de servicio	N/A
Formato de recepción de bombas de infusión	1 año	Jefes de servicio	N/A

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	só: , \ J	Autorizó;
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento	Subdirector de Aténción Hospitalaria y Consulta Externa)	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Smatalle	WHILLIAME!			
Fecha:	1.10	Agos	to 2018		/



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

bombas de infusión

3. Procedimiento para el manejo y cuidado de

REV:

00

HOJA: 17

DE: 21

8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO

8.1 Bomba de Infusión:

Dispositivo electrónico computarizado capaz de suministrar, mediante su programación y de manera controlada, una determinada cantidad de soluciones endovenosas con o sin fármacos agregados (infusiones parenterales) u oral (infusiones enterales) a pacientes que por su condición así lo requieran.

8.2 Desinfección

Procesos de destrucción de microorganismos patógenos de una

superficie inanimada a excepción de esporas.

8.3 Limpieza

Proceso de eliminación de restos orgánicos e inorgánicos de una

superficie.

8.4 Marbete

Membrete o etiqueta adherible que se coloca sobre una superficie para

indicar alguna información relacionada con ella.

8.5 Sanitización:

Proceso por el cual se realiza una reducción sustancial del contenido microbiano, hasta un nivel de seguridad, sin que se llegue a la desaparición completa de microorganismos patógenos, lo cual reduce el

riesgo de producir algún tipo de infección.

8.6 Toallas de oxivir:

Oxivir TB Wipes son toallas virucida, bactericida, fungicida y tuberculocida de un solo paso que cuando se emplea según las indicaciones son efectivas contra microorganismos como: Pseudomona aeruginosa, salmonella entérica, staphylococus aureus, enterococcus faecium (resistente al Vancomycin), norvovirus, VHB, VHC, VIH-1 e influenza aviar.

9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

Número de Revisión	Fecha de la Actualización	Descripción del Cambio
No Aplica	No Aplica	No Aplica

10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO

10.1 Anexo 1 Recomendaciones de Limpieza

10.2 Anexo 2 Marbete con Datos de Mantenimiento Realizado

10.3 Anexo 3 Formato de Control de Bombas de Infusión para Revisión Externa por Proveedores

10.4 Anexo 1 Formato para la Recepción de Bombas de Infusión

		CONTROL	. DE EMISIÓN		\mathcal{N}	
	Elabo	ró:	∕	Revisó:	/)	Autorizó;/
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apoda Cruz	ca Dr. A Herrera	•	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermenia	Sub director de Atención Hospital y Consulta E y ten	aria Director	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	Director General
Firma:	SK TOTAL	Mullitute.				
Fecha:	11 00	Agos	to 2018			J

SALUD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

3. Procedimiento para el manejo y cuidado de bombas de infusión

REV:

00

HOJA: 18

DF: 21

ANEXO 1 RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Volumat MC Agilla PM 648-62

Página 13 de 13

Limpieza v desinfección

* La bomba Volumat MC Agilia forma parte del entorno cercano al paciente. Se aconseja limpiar y desinfectar con frecuencia las superficies externas del aparato y, especialmente, antes de conectar a un nuevo paciente y antes de cualquier operación de mantenimiento para proteger al paciente y al personal del centro.

1. Prepare la solución de detergente-desinfectante.

2. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación. 3. Humedezca un paño desechable con la solución de detergente-desinfectante, con

cuidado de escurrir el paño. Repita cada fase del proceso de limpieza.

4. Empiece limpiando la parte inferior del aparato. Luego, con cuidado, déle la vuelta al aparato sin tocar las partes móviles. Ponga boca abajo el aparato en una superficie limpia.

5. Continúe limpiando las partes del aparato sin mojar los enchufes.

6. Limpie el teclado.

7. Termine con la limpleza de las superficies más expuestas, las zonas más críticas y el cable de red eléctrica.

8. Dete secar.

9. Proteja y mantenga el aparato limpio antes de volverlo a utilizar.

10. Valide el protocolo de mantenimiento con una simple verificación bacteriológica. * No coloque en AUTOCLAVE, ni SUMERJA el aparato. Evite la entrada de líquidos en la

carcasa del aparato.

* NO UTILICE PRODUCTOS A BASE DE: TRICLOROETILENO-DICLORO DE ETILENO-AMONIACOCLORURO DE AMONIACO-HIDROCARBUROS CLORADOS Y AROMÁTICOS-DICLORURO DE ETILENOCLORURO DE METILENO-CETONAS. Estos agentes agresivos podrían dañar las partes plásticas y provocar un mal funcionamiento del aparato.

* Tenga cuidado también con los PULVERIZADORES A BASE DE ALCOHOL (20-40% de alcohol), debido a que provocan la pérdida de brillo y el agrietamiento del plástico y no representan una acción limpiadora suficiente antes de cualquier desinfección. Se pueden utilizar desinfectantes en PULVERIZADOR desde una distancia de 30 cm con respecto al

aparato, evitando la acumulación del producto en forma líquida, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Precauciones ante cambio de funcionamiento:

Fresenius Kabi garantiza este producto contra cualquier defecto en los materiales y su fabricación (a excepción de baterías y accesorios) durante un periodo de 1 año a partir de la fecha de factura.

Si el dispositivo se cae o no funciona correctamente, deberá informar al técnico cualificado de su centro o a nuestro Servicio de Asistencia Postventa. En cualquiera de estos casos, el dispositivo no deberá utilizarse

Mantenimiento preventivo

Para asegurar un correcto funcionamiento del aparato, se recomienda efectuar un mantenimiento preventivo cada 3 años. Este incluye la sustitución de la batería y membrana de bombeo. Estas acciones deberán ser ejecutadas por un técnico cualificado con la ayuda del manual técnico.

		CONTROL	DE EMISIÓN		IV	
	Elabo	ró:		Revisó:	10	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Apod Cruz		r. Ángel era Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector d Atención Hospita y Consulta Exte	alaria Direc	tor General nto Médico	Director General
Firma:	Synthetic	dilititute			U	
Fecha:	1	Agos	to 2018			/

SALUD SUSTEMBADI SUDD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

3. Procedimiento para el manejo y cuidado de bombas de infusión



REV:

HOJA: 19

00

DE: 21

ANEXO 2 MARBETE CON DATOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO



		CONTROL	. DE EMISIÓN	1 ()	
	Elabo	ró:	Revi		Autorizó;
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Arigel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enferme <i>f</i> ía	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Stratutury	Shunthe.		4.76.	
Fecha:	1.70	Agos	to 2018	C	

SALUD NEFTABIA DI MALEO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

3. Procedimiento para el manejo y cuidado de bombas de infusión



REV:

00

HOJA: 20

DE: 21

ANEXO 3 FORMATO DE CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN PARA REVISIÓN EXTERNA POR PROVEEDORES



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA Y CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA


FORMATO DE CONTROL DE BOMBAS DE INFUSIÓN PARA REVISIÓN EXTERNA POR PROVEEDORES

No. Control interno	No. Serie	Motivo de salida	Fecha de salida	Nombre de quién recoge la bomba (empresa)	Nombre de quién da salida a la bomba (INCan)	Fecha de entrega de bomba reparada	Nombre de quién recibe (INCAN)	Nombre de quien entrega (empresa)	Observaciones
						- 4.00 (4.00)			
						3 1 1 1 1 3			
			7,3						
			ober 1986						
			1,54,714					1.1.1	
				Art. Th					
,,									
						\$ -1-38°			
			- 1						
									*
								V. 31	

		CONTROL	DE EMISIÓN	1		1	
	Elabo	ró:		Revisó		\	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Ap Cruz	daca	Dr. Ar Herrera (10	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirecto Atención Hosb y Consulta Ex	italaria	Director C Adjunto M		Director General
Firma:	Xmitate 124	Mullitute				U	
Fecha:	1110	Agos	to 2018				,

Cuba



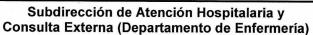

3. Procedimiento para el manejo y cuidado de bombas de infusión



REV:

HOJA: 21

00

DE: 21

ANEXO 4 FORMATO PARA LA RECEPCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN



SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA Y CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

RECEPCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMAT MC AGILIA E

SERVICIO: ROTULADO CON EL NOMBRE DE CADA SERVICO

No.	Número de	Fecha			Fecha	V		Fecha		
control interno	serie	TM	TV	TN	ТМ	TV	TN	TM	TV	TN
1	22535645									
2	22535720									
3	22535623									
4	22442150									
5	22537331									
6	22536020									
7	22441669									
8	22537287	/								
9	22537297									
10	22537325									
11	22537289									
12	22535622									
13	22535638									
14	22535732									
15	22535996									
Nombre d	e quién recibe									

		CONTROL	. DE EMISIÓN		
-	Elabo	ró:	Revis	só:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses Gárcía
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermeríja	Subdirector de/ Atención Hospitalaria /y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Xnot Cutt	Alminite:			
Fecha:	1 Hours of 2	Agost	to 2018	1	/



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

4. Procedimiento para préstamo de bombas de infusión.



REV:

00

HOJA: 1

DE: 17

4. PROCEDIMIENTO PARA PRÉSTAMO DE BOMBAS DE INFUSIÓN

		CONTROL	DE EMISIÓN	٧		
	Elaboró:			Revisó:		Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Ap Cruz	odaca	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Menesas García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento	Subdirector Atención Hos y Consulta E	italarja	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Struct Ely XIV	Milliant.			71,	
Fecha:			to 2018		\	



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

4. Procedimiento para préstamo de bombas de infusión.



REV: 00

HOJA: 2

DE: 17

1. PROPÓSITO

Garantizar la continuidad del tratamiento de los pacientes que requieren precisión en la infusión continua de diferentes soluciones endovenosas y/o fármacos, mediante la comunicación efectiva entre los diferentes servicios del Instituto, que permita optimizar de manera fehaciente el préstamo de bombas de infusión, para atender de manera oportuna a los pacientes durante su tratamiento.

2. ALCANCE

- 3.1 A nivel interno es aplicable para el personal de enfermería asistencial, jefes de servicio o encargados, anestesiólogos y médicos en los diferentes turnos y servicios.
- 3.2 A nivel externo el procedimiento no es aplicable.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS

- 4.1 El personal de salud implicado en el manejo y uso de bombas de infusión es el responsable de cumplir con este procedimiento y mantenerlo actualizado.
- 4.2 Es responsabilidad de jefes de servicio o encargados, personal asistencial de enfermería y médicos del servicio de los diferentes turnos, mantener el resguardo del stock de bombas de infusión, así como de las torres con las respectivas bombas asignadas.
- 4.3 En caso de incremento de tratamientos que requieran el uso de bombas de infusión, y las bombas del servicio se encuentren ocupadas, el personal de enfermería que la requiera es el responsable de informar a su jefe o encargado de servicio, así como la cantidad que requiere.
- 4.4 Es responsabilidad del jefe de servicio o encargado solicitar con los jefes o encargados de otros servicios el préstamo de la (las) bomba (s) de infusión y firmar el vale de préstamo autorizado; en caso de que el vale no se encuentre firmado por el jefe o encargado no podrá hacerse el préstamo.
- 4.5 Es responsabilidad del personal asistencial de enfermería que requiere la (las) bomba (s) de infusión, realizar el vale de préstamo correspondiente llenando cada uno de los rubros solicitados, recabar la firma de su jefe y acudir a recoger la bomba de infusión que le será prestada.
- 4.6 Es responsabilidad del personal asistencial de enfermería que requiere <u>la torre para bombas de infusión</u>, realizar el vale de préstamo correspondiente llenando cada uno de los rubros solicitados, el número de bombas totales con las que cuenta la torre, recabar la firma de su jefe y acudir a recoger la torre con las bombas de infusión que le será prestada.
- 4.7 Es responsabilidad del personal de enfermería disminuir el riesgo de infecciones cruzadas, por lo que debe verificar que la (las) bomba (s) de infusión y o torre que le son prestadas se encuentren en condiciones óptimas de limpieza.
- 4.8 El vale de préstamo se requisita en original y copia con los siguientes datos (Anexo1):
 - Servicio que realiza préstamo de bomba y servicio donde quedará la bomba de infusión.
 - Fecha de préstamo y fecha de entrega.
 - Turno.

		CONTROL	. DE EMISIÓN		
	Elaboró:		Revi	Autorizó:	
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses Garçía
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Medico	Director General
Firma:	XIVILLE SUL	MILLIAN .		NP	
Fecha:	Agosto 2018				



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

s de

REV:

00

HOJA: 3

DE: 17

- 4. Procedimiento para préstamo de bombas de infusión.
- Nombre de la enfermera que realiza el préstamo y nombre de enfermera que solicita la bomba.
- Nombre del jefe o encargado de ambos servicios.
- Nombre completo del paciente, número de expediente, número de cama.
- Número de serie de la (s) bomba (s) de infusión.
- Nombre y firma de la enfermera que realiza entrega y de la que recibe la bomba de infusión.
- 4.9 El vale que se genera derivado del préstamo de la bomba de infusión, se entregará en original y copia de la siguiente forma:
 - El vale original se quedará en el servicio que realiza el préstamo y la enfermera de curaciones o el jefe o encargado del servicio serán los responsables del resguardo del vale hasta la entrega de la bomba.
 - La copia del vale se queda en el servicio que solicitó el préstamo, la enfermera responsable de curaciones o el jefe o encargado de servicio son los responsables de resguardar el vale hasta hacer la entrega de la bomba al servicio correspondiente.
- 4.10 Las enfermeras de curaciones y/o los jefes o encargados de servicio, estarán al tanto del momento en que se desocupe la (s) bomba (s) de infusión, independientemente del turno, para hacer entrega de la misma, firmar el vale y hacer la cancelación correspondiente.
- 4.11 Es responsabilidad de la enfermera que firmó el vale por la bomba de infusión a préstamo, verificar que se haya dado seguimiento a la entrega de la bomba que quedó bajo su responsabilidad, así como verificar que se le haya cancelado el vale.
- 4.12 La cancelación del vale (original y copia) se realiza colocando la leyenda "ENTREGADO" de forma diagonal sobre el texto del vale, una vez cancelado, realizar el resguardo de los vales por el lapso de un año.
- 4.13 Un vale activo no podrá durar más de una semana, en caso de ser así, los jefes de servicio o encargados están obligados a dar seguimiento con el propósito de identificar fallas en el proceso, corregirlo y aplicar las medidas que correspondan.
- 4.14 Es responsabilidad de los jefes o encargados del servicio, contar con la información correspondiente a la existencia y uso de las bombas de infusión, además de verificar que se realicen los procesos correctos para su manejo y control, así como dar seguimiento a aquellas que se prestaron a otros servicios o que se llevaron para su reparación o mantenimiento.
- 4.15 Si durante la estancia de la bomba de infusión en otro servicio, está presenta una falla, es responsabilidad del personal que detectó el problema informar inmediatamente al jefe de servicio o encargado; por lo que deberá rotular la bomba de infusión, registrando la falla que se presente. No debe regresarse la bomba sin informar que ésta no se encuentra funcionando adecuadamente.
- 4.16 Es caso de que la (las) bomba (s) de infusión que se solicitaron a préstamo no se localicen en el servicio, el personal del servicio que solicitó el préstamo procederá a la búsqueda exhaustiva por todos los servicios del INCAN, si ésta (s) no aparece (n) debe informar a su jefe inmediato; por lo que a más tardar en 24 horas debe actuar conforme al "Procedimiento para presentar denuncia para la recuperación de bienes robados y/o extraviados propiedad del Instituto".

2 =		CONTROL	DE EMISIO	Ń		
,	Elaboró:			Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica	Lic. Enf. Inés I.	Dr. Ángel	podaca	Dr Angel	Dr. A. Abelardo
	González González	Mendoza Santos	/Cru	2-1	Herrera Gómez	Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	/Subdired Atención Ho y Consulta	spitalaria	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Struttarly.	allulute			40/	V
Fecha:	Agosto 2018					

SALUD SITE SIDE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:

00

HOJA: 4

DE: 17

4. Procedimiento para préstamo de bombas de infusión.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	tividades Documento o anexo		
Enfermera (o) asistencial que requiere la bomba	1	Informa a su jefe inmediato, la falta de bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión, necesarios para continuar con tratamientos establecidos en las indicaciones médicas de los pacientes a su cargo.	- Indicaciones médicas		
Jefe o encargada (o) del servicio solicitante	2	Recibe informe y solicita al jefe o encargado (a) de otro servicio el préstamo de bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión.	and the control of th		
	3	Recibe notificación de solicitud de préstamo de la (s) bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión y determina:	gen deer General eer 1946 Gelooffer		
		¿Dispone de bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión?	gerion maler sterizione est erro		
Jefe o encargada (o) del servicio que presta	4	No: Informa que no dispone de bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión. Termina actividad.	oup modified officer repeat descriptor (Ad Sint		
	5	Si: Autoriza el préstamo de la (s) bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión e informa al Jefe o encargada (o) del servicio solicitante.	inter tell control and a fat etc. Stein alors (a) - E.F. i- landing control a of chilosoppi.		
Jefe o encargada (o) del servicio solicitante	6	Recibe notificación e informa a la Enfermera (o) asistencial que requiere la (s) bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión, para que elabore el vale de préstamo correspondiente.	Control 12 Ph I		
Enfermera (o) asistencial que requiere la bomba	7	Recibe instrucción y realiza el llenado completo y correcto del vale para el trámite de préstamo de la (s) bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión.	 Vale de préstamo de bombas de 		
	4 B Theodological Philipped Charles (Charles Andrews Charles) (1986) 18 Charles (198		infusión		

		CONTROL	DE EMISIÓ	N		
Black of the second	Elaboró:			Revis	Autorizó:	
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Ar Cruz	1	Dr. Ángel Herrena Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses, García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirect Atención Hos y Consulta	italaria	Director General Adjunto Medico	Director/General
Firma:	Struck Calkey.	William .			42/	ſ
Fecha:	Agosto 2018					



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



DE:

REV:

HOJA: 5

00

17

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
Enfermera (o) asistencial que requiere la bomba	9	Acude al servicio correspondiente a recoger la (s) bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión solicitada (s).	
	10	Dispone de la (s) bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión con el cable de alimentación de corriente eléctrica y en condiciones óptimas de limpieza.	
	11	Verifica que el vale de préstamo de bombas de infusión se encuentre debidamente requisitado y determina:	
		¿Está debidamente requisitado?	ı
Enfermera (o) del área prestadora	12	No: Devuelve vale de préstamo de bombas de infusión para su requisitado correcto. Regresa a la actividad número 7.	 Vale de préstamo de bombas de infusión
	13	Si: Hace entrega de la (s) bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión a la enfermera (o) solicitante, cotejando que se encuentre funcional y con su respectivo cable de alimentación.	
	14	Recaba firma del Jefe o encargada (o) del servicio que presta, en el vale de préstamo de bombas de infusión, cotejando, de ser posible, que el equipo se encuentre en óptimas condiciones.	
	15	Recibe vale de préstamo de bombas de infusión, coteja de ser posible, que el equipo se encuentre en óptimas condiciones.	4
	16	Firma vale de préstamo de bombas de infusión,	
Jefe o encargada (o) del servicio que presta		entrega copia para el servicio solicitante y obtiene original del vale de préstamo de bombas de infusión.	 Vale de préstamo de bombas de infusión
	17	Archiva vale de préstamo de bombas de infusión original o lo entrega a la enfermera (o) de curaciones para su resguardo hasta la recepción de la (s) bomba (s) y/o torre que salió a préstamo.	

*		CONTROL	. DE EMISIÓN	l		
	Elabo	ró:		Reviso	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Ap	-	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermenta	Subdirector Atención Hoso y Consulta	italaria	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Structu alla Cal	Mullity.		P 1 1 5	dr)	1
Fecha:	1,41,00	Agos	to 2018			

SALUD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:

DE:

00

17

HOJA: 6

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
Enfermera (o) asistencial que	18	Recibe copia del vale de préstamo de bombas de infusión y la (s) bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión, cotejando que se encuentre funcional y con su respectivo cable de alimentación.	 Vale de préstamo de bombas de
requiere la bomba	19	Entrega copia del vale de préstamo de bombas de infusión a la Jefe o encargada (o) del servicio solicitante, informándole que ya se cuenta con el equipo en préstamo.	infusión
	20	Recibe copia del vale de préstamo de bombas de infusión y notificación de equipo en préstamo.	
Jefe o encargada	21	Archiva copia del vale de préstamo de bombas de infusión o lo entrega a la enfermera (o) de curaciones para su resguardo hasta la entrega de la (s) bomba (s) y/o torre que fue solicitada en préstamo.	 Vale de préstamo de bombas de infusión
(o) del servicio solicitante	22	Informa al personal de los turnos continuos que al desocupar la (s) bomba (s) de infusión y/o torre para bombas de infusión, ésta (s) debe (n) ser entregada (s) al servicio donde se solicitó el préstamo.	- Bitácora de recepción de bombas
	23	Lleva a cabo el control de la recepción de bombas de infusión del servicio en la Bitácora de recepción de bombas.	
Enfermera (o) a cargo del paciente	24	Retira la bomba al terminar su uso, realiza limpieza e informa a la enfermera (o) de curaciones y/o al Jefe o encargada (o) del servicio, que la bomba y/o torre está lista para ser regresada al servicio que realizó el préstamo.	along scores claring.
Enfermera de curaciones y/o Jefe o encargada (o) de servicio solicitante	25	Toma conocimiento, recibe bomba y/o torre, verifica condiciones del equipo y obtiene vale de préstamo de bombas de infusión (copia) que se encuentra resguardado en el servicio.	 Vale de préstamo de bombas de infusión

		CONTROL	. DE EMISIÓN				# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
	Elabo	ró:		Reviso	5 :		Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Apo Cruz	daca	-	Angel Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses Garçía
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector Atención Hosp y Consulta Ex	talaria		General Médico	Director General
Firma:	Started WW.	William C					1
Fecha:	1.00	Agos	to 2018			1	



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:

00

HOJA: 7

DE: 17

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
Enfermera de curaciones y/o Jefe o encargada (o) de servicio solicitante 26 Acude al servicio correspondiente y hace entrega de la (s) bomba (s) de infusión y/o torre prestadas. Registra nombre y firma en el vale de préstamo de bombas de infusión (original y copia) verificando que se coloque la leyenda ENTREGADO. Realiza el resguardo de los vales de préstamo de bombas de infusión (copia) por el lapso de un año.		- Vale de préstamo de bombas de infusión	
Enfermera de curaciones y/o Jefe o encargada (o) del servicio que presta	29 30 31	Recibe y revisa que la bomba y/o torre se encuentre con el cable de alimentación y en condiciones de limpieza. Registra nombre y firma en el vale de préstamo de bombas de infusión (original y copia) registrando además la leyenda "ENTREGADO". Realiza el resguardo de los vales de préstamo de bombas de infusión (original) por el lapso de un año.	Vale de préstamo de bombas de infusión
Enfermera (o) asistencial que requiere la bomba	32	Verifica que se haya dado seguimiento a la entrega de la bomba y/o torre, que quedó bajo su responsabilidad y que se haya cancelado el vale de préstamo de bombas de infusión correspondiente. TERMINA	Vale de préstamo de Bombas de infusión

		CONTROL	DE EMISI	ÓN	1	
	Elabo	ró:		Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica	Lic. Enf. Inés I.	Dr. Angel	Apodaca	Dr. Ángel	Dr. A. Abelardo
TTOTTIBLE.	González González	Mendoza Santos	/ Cru	IZ _P	Herrera Gómez	Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdire Atención Ho y Consult	spitalaria	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Shorty aller	All little		/	W	100
Fecha:	11110	Agos	to 2018			/

SALUD MURETABLE DE SALUD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:


00

HOJA: 8

DE: 17

4. Procedimiento para préstamo de bombas de infusión.

5. DIAGRAMA DE FLUJO

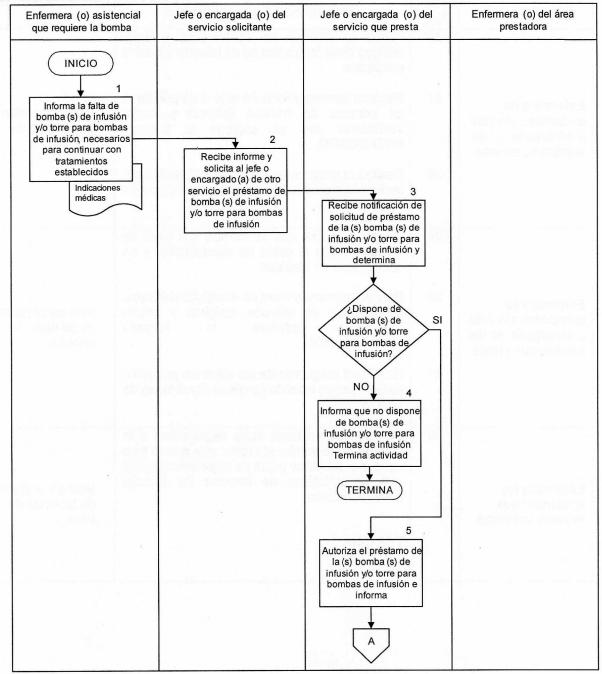

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Reviso	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca C ruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Śubdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Shirthtalley	WHILLIAM !	+	J.W	10
Fecha:	1 10 0	Agos	to 2018		



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

TO COMPANY OF THE PROPERTY OF


REV:

DE:

00

17

HOJA: 9

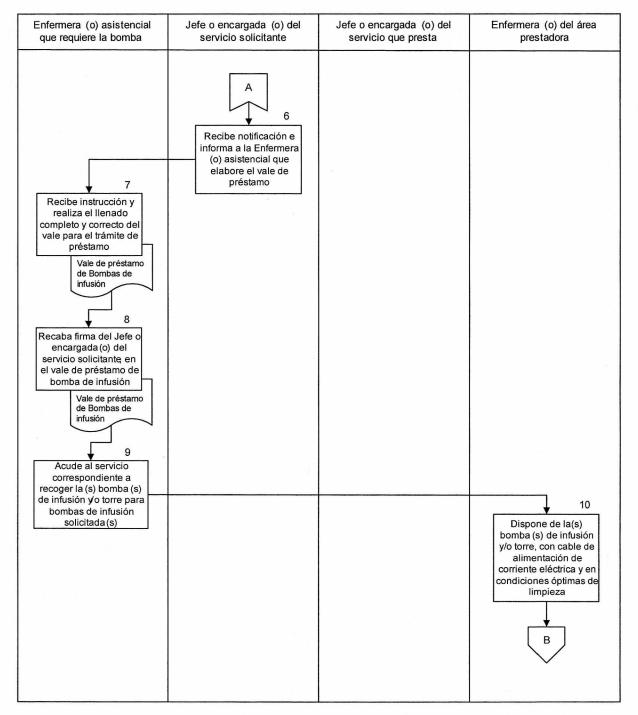

	¥	CONTROL	DE EMISIÓN	1		
	Elabo	ró:		Revis	ó: ^	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Ap Cruz	11	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirecto Atención Hose y Consulta B	italaria	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Shututake	William ?		977.334	XV	
Fecha:	14.1.0	Agost	to 2018			



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)


4. Procedimiento para préstamo de bombas de infusión.



REV:

00

HOJA: 10

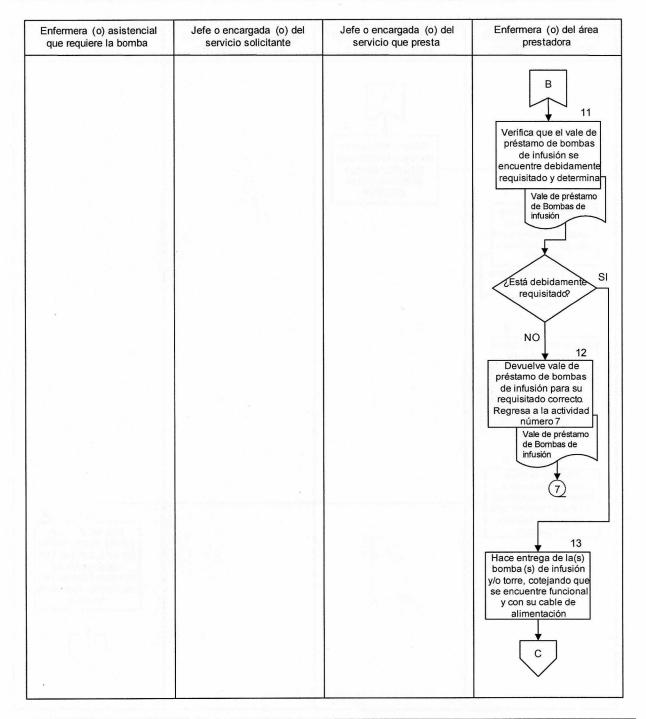

		CONTROL	DE EMISIÓ	N		
	Elabo	ró:		Revis	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel A		Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Atención Ho y Consulta	pitalaria	Director General Adjunto Medico	Director/General
Firma:	Strukterby	Mummitte			di	
Fecha:	1 190	Agos	to 2018			



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

4. Procedimiento para préstamo de bombas de infusión.




1

HOJA:

00

11

REV:

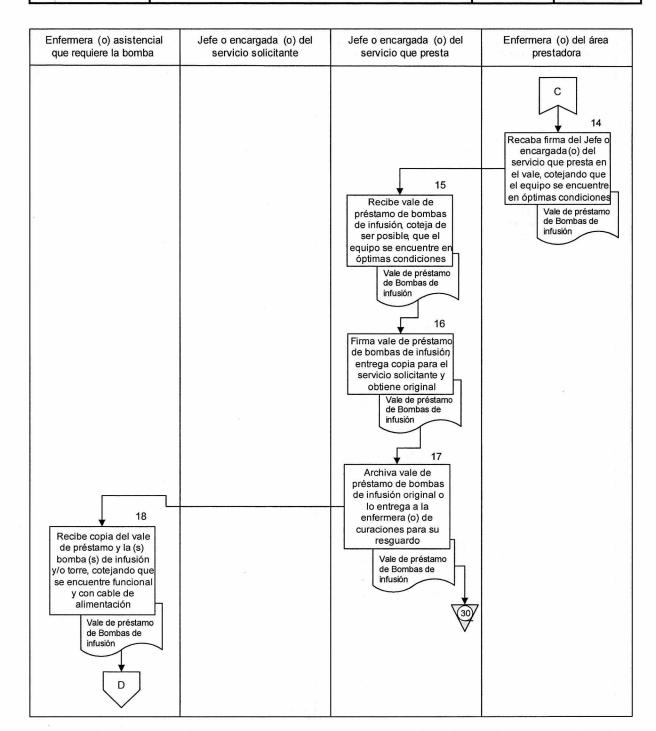

		CONTROL	DE EMISIÓN	1		
	Elabo	ró:		Revise	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Apo Cruz	odaca I	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras "B"	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirecto Atención Hosp y Consulta E	talaria	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Smith College	AMMUNITUE.			1/1/	
Fecha:	77 9 0	Agost	to 2018		1	/

SALUD SCREENIS DE SUIDO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)




REV:

00

HOJA: 12

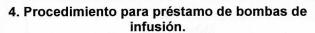

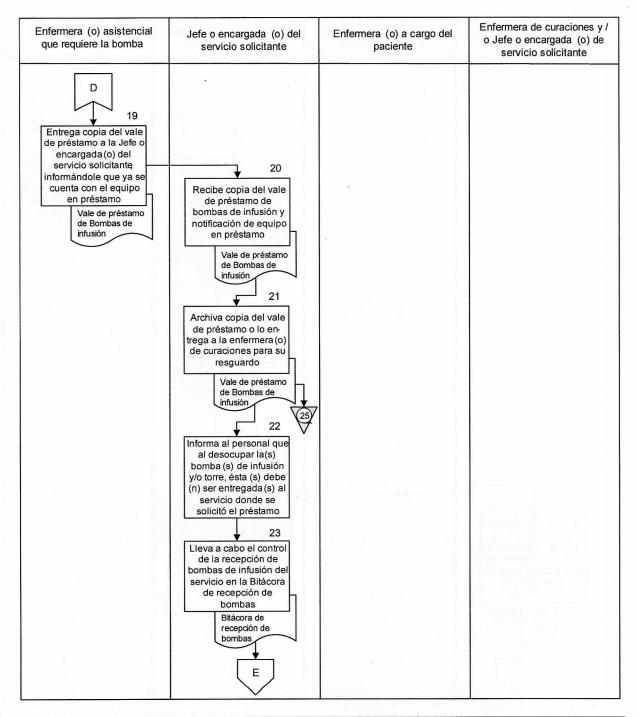

		CONTROL	DE EMISIÓN			
	Elabo	ró:		Reviso	5:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apo Cr <u>uz</u>	daca	Dr. Ángel Herrera∖Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermenta	Subdirector Atención Hosp y Consulta Ex	alaria)	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	SATTITUDE SUL	Jummer .			y y	
Fecha:	J. M. J. D	Agost	to 2018			1



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)


4. Procedimiento para préstamo de bombas de infusión.



REV:

00

HOJA: 13

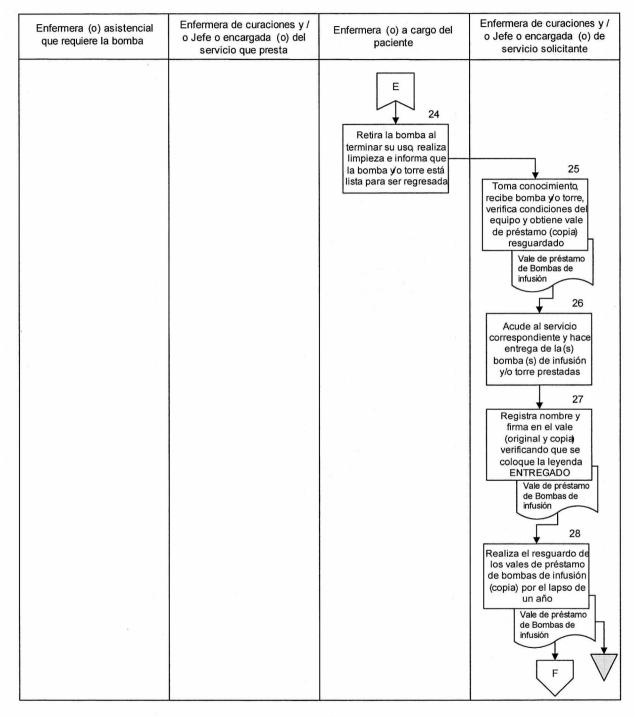

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revi	só:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr Angel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director denéral
Firma:	Structurelle	Millimit .		Ny	
Fecha:	17 / 0 0	Agos	to 2018		/

SALUD SCHILIFATIS SUIPO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)




REV:

00

HOJA: 14

DE: 17

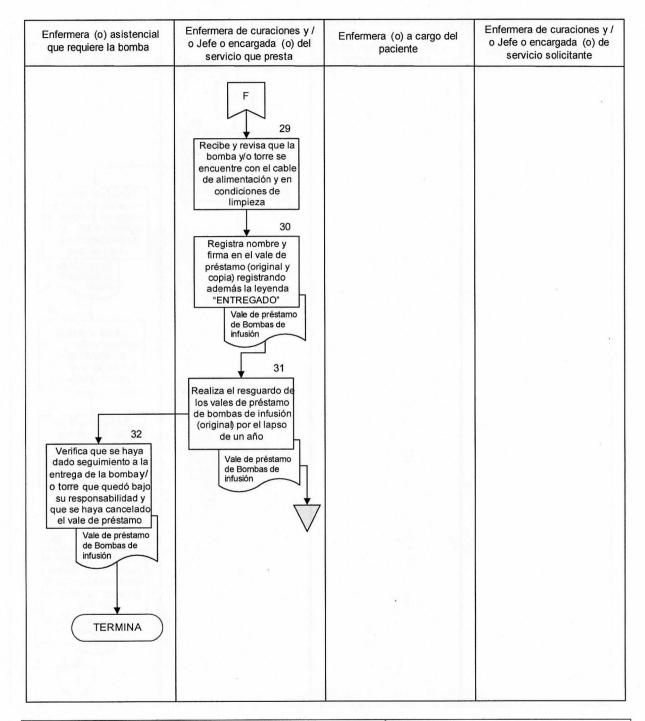

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	Autorizó:	
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera-Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermeria	Subdirector de Atención Hospitalaria y/Consulta Externa	Director General Adjunto Medico	Director General
Firma:	The thelefully	Julillutt.		90	
Fecha:	The state of the s	Agost	to 2018		



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

4. Procedimiento para préstamo de bombas de infusión.



REV:

00

HOJA: 15

DE: 17

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos	Código (cuando aplique)
6.1 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal	N/P
6.2 Ley de los Institutos Nacionales de Salud	N/P
6.3 Reglamento Interior de la Secretaria de Salud	N/P
6.4 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	N/P
6.5 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	N/P
6.6 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	N/P
6.7 Estatuto Orgánico y Decreto de creación del Instituto Nacional de Cancerología	N/P
6.8 Estructura Orgánica Autorizada, vigente (Estructura, dictamen y oficio de la SFP)	N/P
6.9 Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente	N/P
6.10 Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología vigente	N/P
6.11 Procedimiento para el préstamo de bombas de infusión dentro del INCan	N/P
6.12 Procedimiento para presentar denuncia para la recuperación de bienes robados y/o extraviados propiedad del Instituto	MPG-INCAN-2005
6.13 NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.	N/P

7. REGISTROS

Registros	Tiempo de Conservación	Responsable de Conservario	Código de Registro o Identificación Única
Vale de Préstamo Bombas de Infusión	1 año	Jefes de servicio	N/A
Bitácora de recepción de bombas	1 año	Jefes de servicio	N/A

		CONTROL	. DE EMISIÓN		
	Elaboró: Revisó:			Autorizó:	
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector/de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Smithitteller	WHILLIAM.		101	
Fecha:	0 0	Agost	to 2018	2/	



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

4. Procedimiento para préstamo de bombas de infusión.



REV:

HOJA: 16

00

DE: 17

8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO

8.1 Bomba de Infusión:

Dispositivo electrónico computarizado capaz de suministrar, mediante su programación y de manera controlada, una determinada cantidad de soluciones endovenosas con o sin fármacos agregados (infusiones parenterales) u oral (infusiones enterales) a pacientes que por su condición así lo requieran.

8.2 Torre para bomba de infusión Equipo electro médico el cual está diseñado para concentrar más de dos bombas de infusión de manera ordenada, ocupando menor espacio y son alimentadas por un solo cable de corriente eléctrica.

8.3 Vale activo:

Documento oficial en el que se concentran los datos de préstamo o salida de un bien o equipo del Instituto o comodato que *no ha sido cancelado* por el personal involucrado en el proceso.

8.4 Vale de préstamo:

Documento oficial en el cual se concentran los datos del personal responsable de solicitar, autorizar y dar trámite al préstamo de un bien o equipo propiedad del Instituto y que además se encuentra bajo el resguardo y cuidado del personal que lo utiliza. Se requisita en original y copia.

9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

Número de Revisión	Fecha de la Actualización	Descripción del Cambio
No Aplica	No Aplica	No Aplica

10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO

10.1 Anexo 1 Formato Vale de Préstamo Bombas de Infusión

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Revis	só:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Medico	Director General
Firma:	Santitud 1	Hummte.		401	
Fecha:	100	Agos	to 2018	752	/



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

4. Procedimiento para préstamo de bombas de infusión.



REV:

00

HOJA: 17

DE: 17

ANEXO 1 FORMATO VALE DE PRÉSTAMO BOMBAS DE INFUSIÓN"

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

DEPARTAME	N NOSPITALARIA Y CONSULTA ENTERNA ENTO DE ENFERNERIA IO BOMBAS DE INFUSION"
Servicio prestedor:	Servicio solicitante:
Fecha de préstamo:	
Turno:	
Nombre de enfermera (o) que restiza préstamo:	Nombre de enfermera (o) que solicita prestamo:
Nambre y firma de jete o encargada de servicio:	Nombre y firma de jefe o encargada de servicio:
Nombre del Paciente:	
No. Expediente: No.	Cama:
1-No. Folio: Cabi	le: Si No
2-No. Folio: Cebi	ie: Si No
	le: Si No
	le: Si No
Nombre y Firms de Enfermers que recibe bombs de INSTITUTO NACI SUBDIRECCION DE ATENCION DEPARTANCI	IONAL DE CANCEROLOGÍA N HOSPITALARIA Y CONSULTA ENTERNA COPIA
Nombre y Firms de Enfermers que recibe bombs de INSTITUTO NACI SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEFARTASE VALE "PRESTAM	IONAL DE CANCEROLOGÍA N HOSPITALARIA Y CONSULTA ENTERNA ENTO DE ENPERMERÍA IO BOMBAS DE INFUSIONº
Nombre y Firms de Enfermers que recibe bombs de INSTITUTO NACI SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEFARTASE VALE "PRESTAM" Servicio prestador:	IONAL DE CANCEROLOGÍA N HOSPITALARIA Y CONSULTA ENTERNA ENTO DE ENPERNIERÍA IO BOMBAS DE INFUSION® Servicio solicitante:
Nombre y Firms de Enfermers que recibe bombs de INSTITUTO NACI SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEFARTASE VALE "PRESTAM Servicio prestador: Fechs de préstamo:	IONAL DE CANCEROLOGÍA N HOSPITALARIA Y CONSULTA ENTERNA ENTO DE ENFERNERÍA IO BOMBAS DE INFUSIÓN® Servicio solicitante: Fecha de Entrega:
Nombre y Firms de Enfermers que recibe bombs de INSTITUTO NACI SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEFARTANE VALE "PRESTAM Servicio prestador: Fecha de préstamo: Turno:	IONAL DE CANCEROLOGÍA N HOSPITALARIA Y CONSULTA ENTERNA ENTO DE ENFERNERÍA IO BOMBAS DE INFUSION® Servicio solicitante: Fecha de Entrega:
Nombre y Firms de Enfermers que recibe bombs de INSTITUTO NACI SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEFARTANT VALE "PRESTAM Servicio prestador: Fecha de préstamo: Turno: Nombre de enfermers (o) que realiza préstamo:	IONAL DE CANCEROLOGÍA N ROSPITALARIA Y CONSULTA ENTERNA ENTO DE ENPERNIRIA IO BOMBA S DE INFU SIÓN* Servicio solicitante: Fechs de Entregs: Turno:
Nombre y Firms de Enfermers que recibe bombs de INSTITUTO NACI SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEFARTANI VALE "PRESTAM Servicio prestador: Fecha de préstamo: Turno: Nombre de enfermers (o) que resiliza préstamo: Nombre y firms de jefe o encargada de servicio:	IONAL DE CANCEROLOGÍA N ROSPITALARIA Y CONSCLTA ENTERNA ENTO DE ENPERNERIA IO BOMBA S DE INFU SIÓN* Servicio solicitante: Fecha de Entrega: Turno: Nombre de enfermera (o) que solicita préstamo: Nombre y firma de jefe o encargada de servicio:
Nombre y Firms de Enfermers que recibe bombs de INSTITUTO NACI SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEFARTASE VALE "PRESTAM Servicio prestador: Fecha de préstamo: Turno: Nombre de enfermers (o) que realiza préstamo: Nombre y firms de jefe o encargada de servicio: Nombre del Paciente:	IONAL DE CANCEROLOGÍA N ROSPITALARIA Y CONSCLTA ENTERNA ENTO DE ENPERNIERÍA O BOMBAS DE INFUSION™ Servicio solicitante: Fecha de Entrega: Turno: Nombre de enfermera (o) que solicita préstamo: Nombre y firma de jefe o encargada de servicio:
Nombre y Firms de Enfermers que recibe bombs de INSTITUTO NACI SUBDIRECCION DE ATENCION DEFARTASE VALE "PRESTAM Servicio prestador: Fecha de préstamo: Turno: Nombre de enfermers (o) que resiliza préstamo: Nombre y firms de jefe o encargada de servicio: Nombre del Paciente: No. Expediente: No.	INFUSIÓN: IONAL DE CANCEROLOGÍA N HOSPITALARIA Y CONSULTA ENTERNA ENTO DE ENTERNERÍA IO BOMBAS DE INFUSIÓNº Servicio solicitante: Fecha de Entrega: Turno: Nombre de enfermera (o) que solicita préstamo: Nombre y firma de jefe o encargada de servicio: Cama:
Nombre y Firms de Enfermers que recibe bombs de INSTITUTO NACI SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEFARTASEI VALE "PRESTAM Servicio prestador: Fecha de préstamo: Turno: Nombre de enfermers (o) que realiza préstamo: Nombre y firms de jefe o encargada de servicio: Nombre del Paciente: No. Expediente: No. Expediente: No. Folio: 2-No. Folio: Cable 2-No. Folio: Cable Cable	INFUSIÓN: IONAL DE CANCEROLOGÍA N HOSPITALARIA Y CONSULTA ENTERNA ENTO DE ENPERNERÍA IO BOMBAS DE INFUSION* Servicio solicitante: Fecha de Entrega: Turno: Nombre de enfermera (o) que solicita préstamo: Nombre y firma de jefe o encargada de servicio: Cama: IE: SÍ NO
Nombre y Firms de Enfermers que recibe bombs de INSTITUTO NACI SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DEFARTASEI VALE "PRESTAM Servicio prestador: Fecha de préstamo: Turno: Nombre de enfermers (o) que realiza préstamo: Nombre y firms de jefe o encargada de servicio: Nombre del Paciente: No. Expediente: No. Expediente: No. Folio: 2-No. Folio: Cable 2-No. Folio: Cable Cable	INFUSIÓN: IONAL DE CANCEROLOGÍA N ROSPITALARIA Y CONSULTA ENTERNA ENTO DE ENPERMERÍA IO BOMBAS DE INFUSIÓNº Servicio solicitante: Fecha de Entrega: Turno: Nombre de enfermera (o) que solicita préstamo: Nombre y firma de jefe o encargada de servicio: Cama: IE: SÍ No

		CONTROL	DE EMISIÓN			
_	Elabo	ró:		Reviso	ó:	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Apo Cruz	daca	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector Atención Hospi y Consulta Ex	talarija	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Smitalkelly	- Millitude			70/	
Fecha:	- "" O	Agos	to 2018			

Nombre y Firms de Enfermers que recibe bombs de infusión:



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

5. Procedimiento para el traslado de pacientes con bomba de infusión



REV:

00

HOJA: 1

DE: 15

5. PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES CON BOMBA DE INFUSIÓN

		CONTROL	DE EMISIÓN		-	1	
	Elabo			Revisó:	- X		Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apo Cruz	304.4014.0000	Dr. Ánd Herrera G		Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento	Subdirector Atención Hospi y Consulta Ext	talaria D	irector G Adjunto M	1	Director General
Firma:	Smith toker	HHHHH					
Fecha:	- 14	Agos	to 2018				J



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

5. Procedimiento para el traslado de pacientes con bomba de infusión



REV:

00

HOJA: 2

DE: 15

1. PROPÓSITO

Establecer las medidas necesarias que permitan garantizar un adecuado funcionamiento de las bombas de infusión durante el traslado de pacientes en los diferentes servicios del Instituto, a fin de prevenir eventos adversos.

2. ALCANCE

- 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa, a través del Departamento de Enfermería (personal de camillería y de enfermería); médicos y técnicos del INCan en los diferentes turnos y servicios.
- 2.2 A nivel externo el procedimiento no es aplicable.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS

- 3.1 El personal implicado en el manejo y uso de bombas de infusión durante el traslado de pacientes, es el responsable de cumplir con este procedimiento y de mantenerlo actualizado.
- 3.2 Es responsabilidad del Departamento Enfermería, a través de los camilleros lo siguiente:
 - a) Conocer el manejo correcto de las bombas de infusión antes de ser utilizadas por primera vez, en particular los motivos por los cuales se activan las alarmas,
 - b) Cumplir con el lavado o higiene de manos como lo marca la acción esencial número cinco, al realizar traslado de pacientes y manipular las bombas de infusión,
 - c) Verificar los datos del paciente conforme a la acción esencial número uno, antes de desconectar alguna bomba de infusión y trasladar al paciente.
 - d) Al trasladar al paciente deberá identificar las infusiones de medicamentos de alto riesgo e informar de inmediato cuando exista alguna anomalía con las bombas de infusión.
 - e) Verificar que la(s) bomba(s) de infusión con que se traslada al paciente cuenten con batería suficiente para el tiempo aproximado que dure el traslado.
 - f) Verificar que el familiar del paciente o cuidador primario, no manipule la bomba de infusión al activarse la alarma durante el traslado.
 - g) En pacientes con más de dos bombas de infusión, el camillero deberá valorar y solicitar a la enfermera a cargo del paciente, que retire los equipos de la(s) bomba(s) de infusión que puedan ser suspendidos y que no comprometan la continuidad del tratamiento médico mientras se traslada al paciente.
 - h) Verificar que los pacientes que serán sometidos a estudios de Resonancia Magnética, no lleven bombas de infusión o en su defecto éstas queden fuera del alcance magnético del equipo de resonancia.

		CONTROL	. DE EMISIÓI	V	V	. λ	
	Elabo	ró:		Revis	ó: V	\circ	Autorizó;
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Ap Cruz		Dr. A Herrera		Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermetja	Subdirecto Atención Hos y Consulta E	italaria	Director Adjunto		Director Genera
Firma:	XMULLIU GUI	WHILLIAM Y					
Fecha:	11.7	Agos	to 2018	V			/



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

5. Procedimiento para el traslado de pacientes con bomba de infusión



REV:

00

HOJA: 3

- i) Colocar las bombas de infusión en el tripié de la unidad e informar a la enfermera a cargo del paciente para que dé continuidad al tratamiento, una vez que haya regresado el paciente del traslado.
- j) Utilizar las medidas de seguridad estándar en pacientes con aislamiento, con uso de bombas de infusión y que requieren ser trasladados.
- 3.3 Es responsabilidad de la enfermera a cargo del paciente, así como del camillero, informar al familiar del paciente que durante el baño de regadera las bombas de infusión no se humedezcan o mojen.
- 3.4 Es responsabilidad de camilleros, enfermeras, médicos o técnicos que trasladen pacientes dentro de los servicios del Instituto, dar buen uso a las torres y bombas de infusión durante el traslado, así como verificar su funcionamiento.
- 3.5 Las bombas de infusión con que se traslade el paciente, deberán ser colocadas en los tripies de las camillas o sillas de ruedas, asegurándose que el clapm quede perfectamente cerrado para evitar la caída de las bombas o eventos adversos en el paciente.
- 3.6 En los pacientes que cuentan con bomba(s) de infusión y que deambulan fuera de su unidad, es responsabilidad del camillero y personal de enfermería informar al paciente o al familiar, que al regreso a la unidad conecten la(s) bomba(s) de infusión para evitar que se descargue la batería y prevenir eventos adversos.
- 3.7 En caso de traslado definitivo del paciente de un servicio a otro, es responsabilidad del personal de enfermería que traslada al paciente, regresar las bombas de infusión al servicio de donde egreso el paciente o proceder conforme al procedimiento para préstamo de bombas de infusión.
- 3.8 En caso de traslado del paciente fuera del Instituto, es responsabilidad del personal de enfermería y del camillero, verificar que la bomba de infusión cuente con batería suficiente para el tiempo aproximado en que dure el traslado, de lo contrario, se debe realizar el cambio por una bomba de infusión con batería llena.
- 3.9 Es responsabilidad del personal que realiza el traslado y que detecta alguna falla, informar inmediatamente al jefe de servicio o encargado sobre las fallas presentadas en el funcionamiento de las bombas de infusión para su pronta reparación.
- 3.10 Es responsabilidad de los usuarios de bomba de infusión notificar al jefe de servicio o encargado, cuando haya sufrido una caída o haya recibido un golpe que pudiera dañar su funcionamiento.
- 3.11 Los jefes de servicio o encargados de los diferentes turno y servicios, serán los responsables de verificar que el personal a su cargo cumpla las políticas establecidas para éste procedimiento.

		CONTROL	DE EMISIÓN			\mathbb{N}	,
	Elabo	ró:		Revisó:	- \/	X	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Ápod Cruz		Dr. Án Herrera C		Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermenta	Sub director o Atención Hospita y/Consulta Exte	alaria	Director G Adjunto M		Director General
Firma:	Christo WW	White.			l lie. Ti		
Fecha:	114 11	Agos	to 2018				

SALUD NY SETAMAD BARDO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

5. Procedimiento para el traslado de pacientes con bomba de infusión



REV:

00

HOJA: 4

DE: 15

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable No.		Descripción de actividades	Documento o anexo
Enfermera jefe o encargada de servicio	1	Informa al camillero sobre la necesidad de realizar estudios o traslado de pacientes.	enimentifici Sugaran sila
g ya te kundintas te a Xee vel datas telas	2	Toma conocimiento de la necesidad de realizar estudios o traslado de pacientes y determina:	Markova or 22 P. A. Ala rosa Mariana Markova p.
		¿El paciente será trasladado a estudio o a otra cama o servicio?	
Camillero	3	No: Verifica la acción a seguir y/o en espera de indicación para realizar traslado. Pasa a la actividad número 4.	
	4	Si: Solicita ticket de estudio o información sobre el destino de traslado, a la enfermera a cargo del paciente.	
	5	Valora las condiciones de traslado en coordinación con la enfermera a cargo del paciente.	
	6	Entrega al camillero el ticket de estudio correspondiente o la información sobre el destino de traslado.	nge ing mering 1988 Manggara i sawa y Manggara sawanna
	7	Valora las condiciones del paciente e infusiones administradas y determina:	
Personal de enfermería		¿Se pueden suspender infusiones de medicamentos para desconectar equipo(s) de la(s) bomba(s) de infusión?	 Ticket de estudio
	8	No: Informa al camillero para que realice el traslado. Pasa a la actividad número 11.	
	9	Si: Desconecta equipo(s) de la (s) bomba(s) de infusión, de aquella(s) infusión(es) a suspender temporalmente.	

		CONTROL	DE EMISI	ÓN		IV	
	Elabo	ró:		Revis	ó: \	11	Autorizó:,
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Cr	The second second second	Dr\ \	ngel Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdire Atención H y Consult	ospitalaria	Director Adjunto		Director General
Firma:	Structive WW	Milliant "					
Fecha:	77700	Agos	to 2018			V	

SALUD



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

5. Procedimiento para el traslado de pacientes con bomba de infusión



REV:

00

HOJA: 5

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
Personal de enfermería	10	Deja en condiciones óptimas al paciente para el traslado e informa al camillero.	
	11	Recibe informe de que puede realizarse el traslado del paciente, así como ticket del estudio correspondiente, en su caso.	
	12	Procede a identificar al paciente con Brazalete de identificación y Marbete de cabecera, de acuerdo a la Acción Esencial número 1 (Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente).	
	13	Informa al paciente del traslado a realizar.	7
	14	Realiza lavado o higiene de manos de acuerdo a Acción Esencial número 5 (Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente).	- Ticket de estudio - Acción Esencial número 1
Camillero	15	Desconecta el cable alimentador de corriente eléctrica de la (s) bomba (s) de infusión.	Brazalete de identificaciónMarbete de
	16	Coloca la (s) bombas (s) de infusión en el tripie de silla o camilla donde se coloca al paciente para el traslado.	cabecera - Acción Esencial número 5
	17	Realiza el movimiento del paciente de la cama o reposet a la camilla o silla de ruedas, utilizando las medidas de seguridad para la prevención de caídas.	
	18	Traslada al paciente para que se le realice el estudio correspondiente, o en su caso a la cama o al servicio indicado.	
	19	Verifica funcionamiento de la (s) bomba (s) de infusión durante el traslado.	

		CONTROL	. DE EMIŞIQ	N		/ \	,
	Elabo	ró:		Reviso	ó: V		Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica	Lic. Enf. Inés I.	Dr. Ángel A	oodaca	Dr. Ár	jel 🗎	Dr. A. Abelardo
Nombre.	González González	Mendoza Santos	/ Cruz		Herrera G	ómez	Meneses Carcía
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirect Atención Hos y Consulta E	pitala/ia	Director G Adjunto M		Director General
Firma:	Stretules	WHITHIE.		1 3, 2			/
Fecha:	1 9 1	Agos	to 2018	V		0	

SALUD SCITTABLE DI MATER

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:

DE:

00

15

HOJA: 6

5. Procedimiento para el traslado de pacientes con bomba de infusión

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
	20	Continúa con la indicación médica y de enfermería, en caso de que el paciente pase a otro servicio al término del traslado o lo regresa a la cama de origen y determina: ¿El paciente se traslada a otro servicio?	adir (v. Spared) Pl 18 ** normalicus
Camillero	21	No: Instala al paciente en la cama asignada, lo deja cómodo, conecta las bombas de infusión a la corriente eléctrica e informa al personal de enfermería del regreso del paciente. Pasa a la actividad número 24.	
	22	Si: Pasa al paciente a la cama o camilla asignada del servicio a donde ingresa e informa al personal de enfermería del servicio. Pasa a actividad número 27.	
	23	Regresa la camilla o silla de ruedas al servicio de donde egreso el paciente.	
en e	24	Recibe informe respecto al traslado realizado y concluido, por parte del camillero.	
	25	Verifica que el paciente esté instalado en su unidad y conecta equipos de bombas de infusión en caso de haberlas retirado para el traslado.	Indicaciones
Personal de enfermería	26	Programa bombas de infusión de acuerdo a las indicaciones médicas y registros de enfermería y verifica funcionamiento de las mismas. Termina procedimiento	médicas - Hojas de registros de enfermería - Procedimiento par el préstamo de
	27	Acude a instalar al paciente en la unidad o servicio al cual ingreso.	bombas de infusió
	28	Realiza el cambio de bombas de infusión e instala equipos o procede conforme al procedimiento para el préstamo de bombas	

		CONTROL	. DE EMISIÓN	. \ \ \	
	Elabo	ró:	Revi	só: 🔥 🗥	Autorizó;
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermeria	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director Genera Adjunto Medico	I)iractor (-anarai
Firma:	XTWO ALLOW	Mullium .			
Fecha:	1 1 8	Agos	to 2018	U	/



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:

00

HOJA: 7

5. Procedimiento para el traslado de	e pacientes
con bomba de infusión	-

Responsable	No. Act.	Descripción de actividades	Documento o anexo
	29	Realiza la entrega del paciente, a la enfermera del servicio asignado.	
Personal de enfermería	30	Recoge las bombas que se desocuparon y las regresa al servicio de donde procede el paciente.	
		TERMINA	

		CONTROL	DE EMISHÓN	l		/ 11	= -
	Elabo	ró:		Revise		774	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica	Lic. Enf. Inés I.	Dr. Angel Ap	daca	Dr.V	Ángel	Dr. A. Abelardo
Normbre.	González González	Mendoza Santos	/ Cruz	_	Herrer	Gómez	Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector Atención Hosp y Consulta Ex	talaria	the forces and	General Médico	Director General
Firma:	Santa talla	dillillitte		- 1.42		is:	
Fecha:	11/11/11	Agos	to 2018	V		U	

SALUD SCRIDBIABI SALITI

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:


00

HOJA: 8

DE: 15

5. Procedimiento para el traslado de pacientes con bomba de infusión

5. DIAGRAMA DE FLUJO:

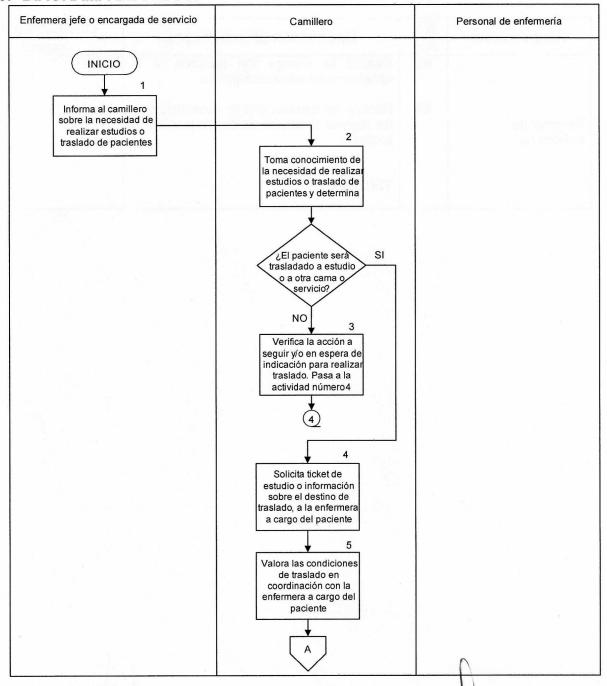

		CONTROL	DE EMISIÓN		
	Elabo	ró:	Rev	visó: \/,\	Autorizó;
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Angel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enferme ía	Súbdirector de Atención Hospitalari y Consulta Ekterna	Adillinto Miedico	Director General
Firma:	Stribert Willy	Junual -			
Fecha:	1.14.	Agos	to 2018		

SALUD SICHE IMPACE SALED

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)




REV:

00

HOJA: 9

5. Procedimiento para el traslado de pacientes con bomba de infusión

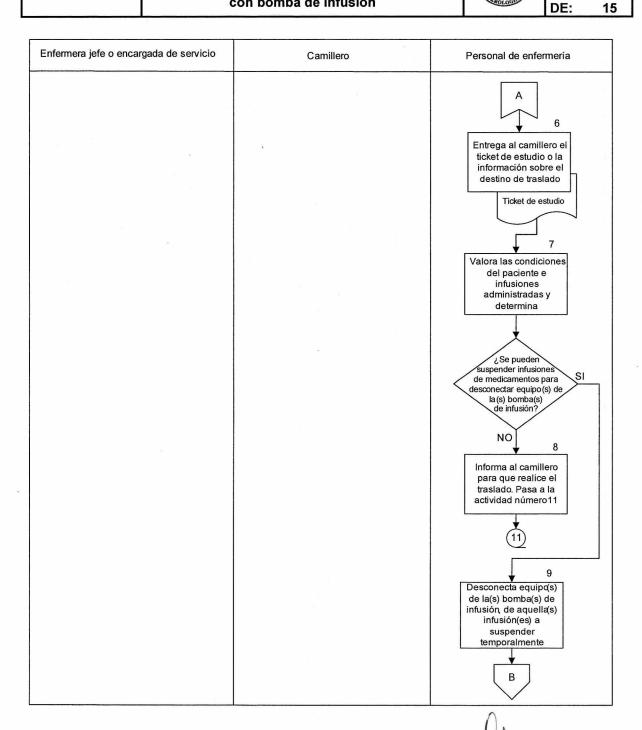

1-2-							
	4 - 3	CONTROL	. DE EMISIĆ	N		/ \	
	Elabo	ró:		Revis		/ N	Autorjzó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr Angel A Cruz		DivA Herrera		Dr. A. Abelardo Meneses/García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Atención Hos y Consulta I	pitalaria	Director Adjunto		Director General
Firma:	Trivaled	WHILLIAM TO THE PARTY OF THE PA		1			
Fecha:	1000	Agos	to 2018	1		0	1

SALUD NCFT DOUGHE NATION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)




REV:

00

HOJA: 10

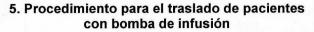

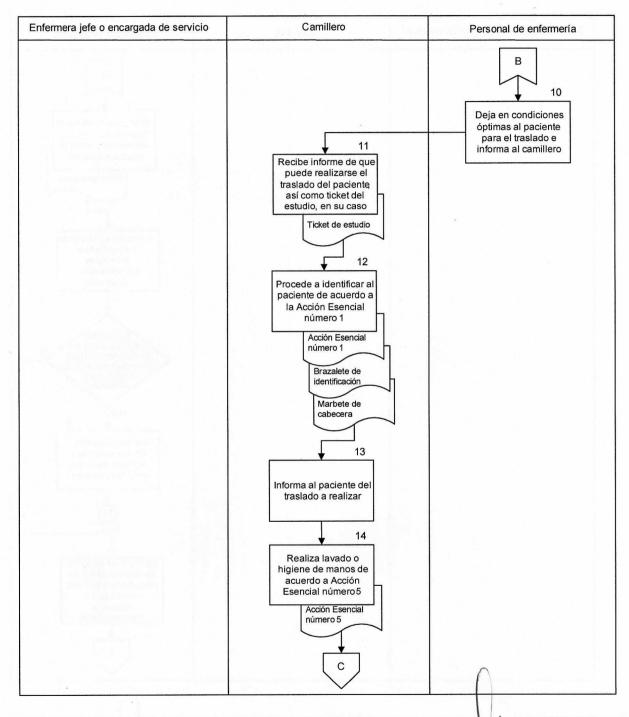

		CONTROL	DE EMISIÓN	Ų			
HEAX T	Elabo	ró:		Reviso	ó :		Autorizø:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr Angel Ap Cruz		Dr. Án Herrera		Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Sub directo Atención Hosi y Consulta E	talaria	Director G Adjunto N	1	Director General
Firma:	Milaklakay	Milliant.					
Fecha:	7 10	Agos	to 2018			V	



Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)


5. Procedimiento para el traslado de pacientes con bomba de infusión



REV:

00

HOJA: 11

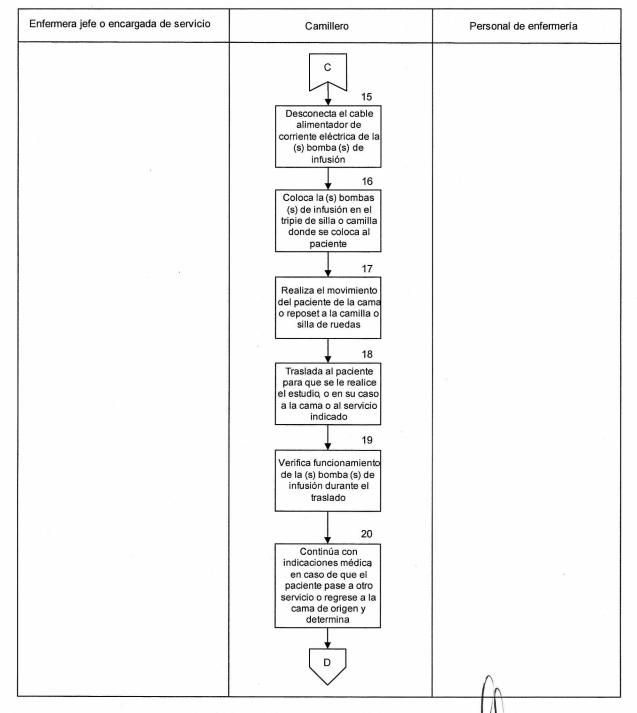

		CONTROL	DE EMIŞIÓN	١			
	Elabo	ró:		Revise	Revisó:		Autoriżó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr Ángel Ap Cruz	odaca	Dr. A Herrera		Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	/ Subdirecto Atención Hosp y Consulta E	alaria	Director Adjunto		Director General
Firma:	* titalely	WHITHITHE.		1		1	
Fecha:	7	Agost	to 2018	V			

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)



REV:


DE:

00

15

HOJA: 12

5. Procedimiento para el traslado de pacientes con bomba de infusión

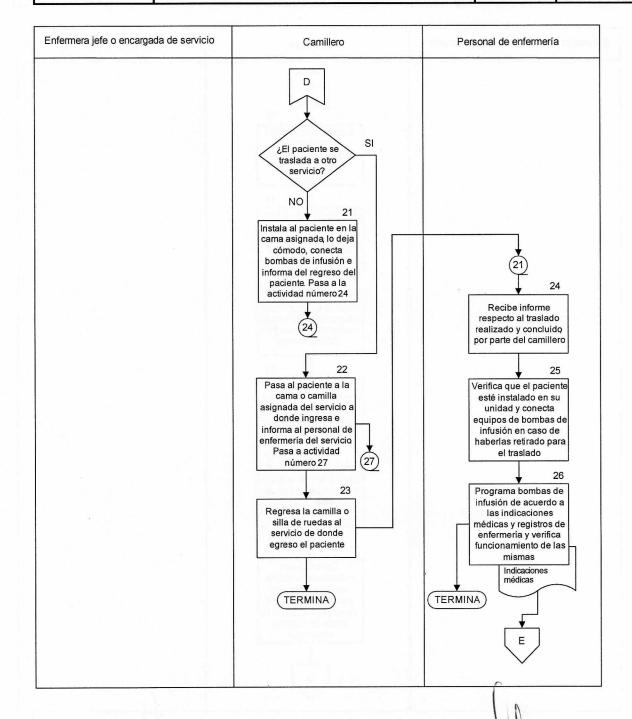

		CONTROL	DE EMISIÓN		,
	Elabo	ró:	Revis	só: //	Autoriző:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ángel Herrera Gómez	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enferme <mark>r</mark> ía	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa	Director General Adjunto Médico	Director General
Firma:	Smithtelle	Junettte-			
Fecha:	1 11 11	Agos	to 2018		




Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

5. Procedimiento para el traslado de pacientes con bomba de infusión



REV: 00

HOJA: 13

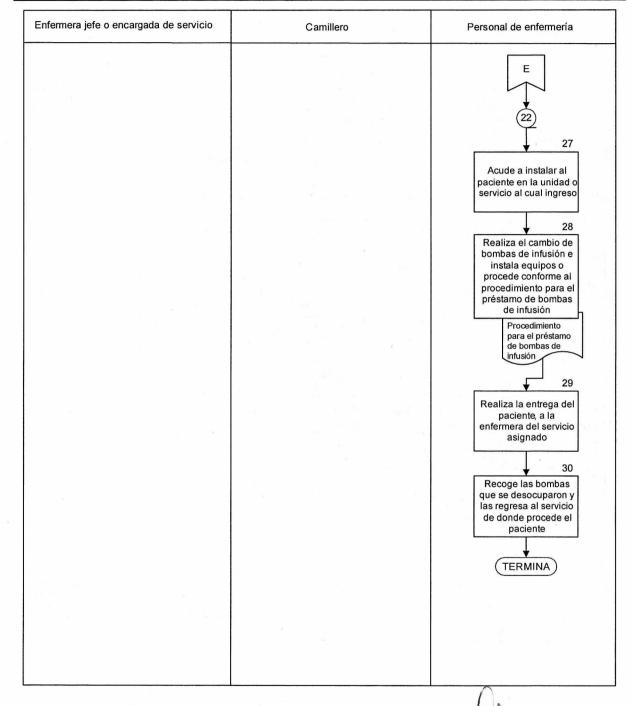

		CONTROL	DE EMISIÓ	N		/\		-1
	Elabo	ró:		Revis	ó: r	/ .)	Aut	oriző:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Angel Ac Cruz	odaca	200000000000000000000000000000000000000	Angel Gómez	CHARLEST NO SUB-	Abelardo es/García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector Atención Hos y Consulta E	pitalaria		General Médico	Directo	r General
Firma:	This Walker	AHHHHHE	(Similar				1	
Fecha:	/"/	Agos	to 2018					

SALUD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

REV:

00

HOJA: 14

DE: 15

5. Procedimiento para el traslado de pacientes con bomba de infusión

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos	Código (cuando aplique)
6.1 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal	N/P
6.2 Ley de los Institutos Nacionales de Salud	N/P
6.3 Reglamento Interior de la Secretaria de Salud	N/P
6.4 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	N/P
6.5 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	N/P
6.6 Estatuto Orgánico y Decreto de creación del Instituto Nacional de Cancerología	N/P
6.7 Estructura Orgánica Autorizada, vigente (Estructura, dictamen y oficio de la SFP)	N/P
6.8 Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente	N/P
6.9 Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología vigente	N/P
6.10 Procedimiento para préstamo de bombas de infusión	N/P
6.11 NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.	N/P
6.12 Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, Consejo de Salubridad General.	N/P
6.13 Las acciones esenciales para la seguridad del paciente dentro del Modelo de Seguridad del Paciente del CSG, edición 2017. Vigentes a partir del 15 de septiembre de 2017	N/P

7. REGISTROS

Registros	Tiempo de Conservación	Responsable de Conservario	Código de Registro o Identificación Única		
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

		CONTROL	DE EMISIÓN	111	
	Elabo	ró:	Revis		Autorizø:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apodaca Cruz	Dr. Ange Herrera Gór	Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermería	Subdirector de Atención Hospitalaria y Consulta Externa)	Director Ger Adjunto Mé	 Director General
Firma:	Trantax UZU	WHILLIAM			
Fecha:	1110	Agost	0 2018		/

SALUD MORLINGARI MICH

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa (Departamento de Enfermería)

5. Procedimiento para el traslado de pacientes con bomba de infusión



REV:

00

HOJA: 15

DE: 15

8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO

8.1 Bomba de Infusión:

Dispositivo electrónico computarizado capaz de suministrar, mediante su programación y de manera controlada, una determinada cantidad de soluciones endovenosas con o sin fármacos agregados (infusiones parenterales) u oral (infusiones enterales) a pacientes que por su condición así lo requieran.

8.2 Clamp de fijación

Dispositivo con que cuenta cada bomba de infusión mediante el cual se ensambla al tripie. La función de aseguramiento se realiza a manera de tornillo que enrosca para sujetar y se desenrosca para desacoplar.

8.3 Marbete de cabecera

Rótulo o etiqueta con adherible que contiene los datos del paciente de acuerdo a la normativa establecida y que se coloca en la cabecera de la unidad del paciente.

8.4 Torre para bombas de infusión Equipo electro médico el cual está diseñado para concentrar más de dos bombas de infusión de manera ordenada, ocupando menor espacio y son alimentadas por un solo cable de corriente eléctrica.

9 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

Número de Revisión	Fecha de la Actualización	Descripción del Cambio		
No Aplica	No Aplica	No Aplica		

10 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO

No aplica.

		CONTROL	. DE EMISIÓN	···		A	
	Elabo			Reviso	ó:	/ X	Autorizó:
Nombre:	L.E.O Angélica González González	Lic. Enf. Inés I. Mendoza Santos	Dr. Ángel Apod Cruz	aca	Dr. A Herrera		Dr. A. Abelardo Meneses García
Cargo-puesto:	Jefe de enfermeras	Jefa del Departamento de Enfermeija	Sub director o Atención Hospita y Consulta Exte	aria	Director (Adjunto		Director General
Firma:	*hully collection	MILLIANTE"		1			1
Fecha:	104 /	Agos	to 2018				